

Lieferumfang

Die oxyhero select CPAP Schlauchhülle ist wie folgt erhältlich:

Art. Nr.	Bezeichnung	Ausführung
01MT0662	oxyhero select CPAP Schlauchhülle	170 cm

WILAMED GmbH
Medizinische Geräte und Zubehör
Aurachhöhe 5 - 7
91126 Kammerstein

Tel.: +49 9178 - 99 69 99 - 0
Fax.: +49 9178 - 99 67 78
email: info@wilamed.de
www.wilamed.com

Made in Germany

oxyhero select CPAP Schlauchhülle

(Schlauchlänge 170cm)



Lieferumfang

Die oxyhero select CPAP Schlauchhülle ist wie folgt erhältlich:

Art. Nr.	Bezeichnung	Ausführung
01MT0662	oxyhero select CPAP Schlauchhülle	170 cm

WILAMED GmbH
Medizinische Geräte und Zubehör
Aurachhöhe 5 - 7
91126 Kammerstein


Tel.: +49 9178 - 99 69 99 - 0
Fax.: +49 9178 - 99 67 78
email: info@wilamed.de
www.wilamed.com

Made in Germany

oxyhero select CPAP Schlauchhülle

(Schlauchlänge 170cm)



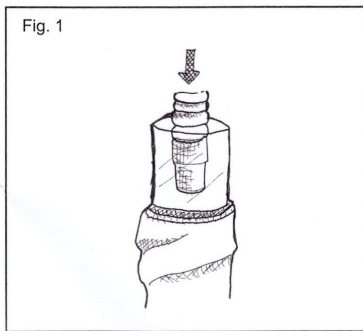


Gebrauch: Der mitgelieferte Folienbeutel wird auf eine der beiden Silikonmuffen des Atemschlauchs gestülpt (Fig. 1).

Durch den Folienbeutel gleitet die Silikonmuffe wesentlich besser und erleichtert das Einziehen in die Schlauchhülle. Schlauchhülle beim Einführen des Atemschlauchs möglichst senkrecht halten und Silikonmuffe aus der Schlauchhülle herausziehen (Fig. 2). **Folienbeutel unbedingt entfernen.** Beide elastischen Enden der Schlauchhülle umschließen den Atemschlauch am jeweiligen Übergang zur Silikonmuffe. oxyhero select CPAP Schlauchhülle **nicht** über das Ausatemventil ziehen.




Reinigung: Schlauchhülle nach Bedarf wie folgt reinigen: Atemschlauch aus der Schlauchhülle ziehen. Schlauchhülle mit einem milden Waschmittel in warmem Wasser waschen. Mit sauberem Wasser alle Waschmittelrückstände gut ausspülen. Schlauchhülle auswringen und zum Trocknen aufhängen. Schlauchhülle nicht schleudern, nicht elektromechanisch trocknen und nicht bügeln. Trockene Schlauchhülle wie im Abschnitt **Gebrauch** beschrieben, wieder auf den Atemschlauch ziehen.

Hinweis: Plastikbeutel von Kindern fernhalten!

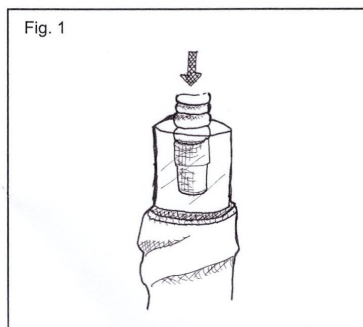

Gebrauch: Der mitgelieferte Folienbeutel wird auf eine der beiden Silikonmuffen des Atemschlauchs gestülpt (Fig. 1).

Durch den Folienbeutel gleitet die Silikonmuffe wesentlich besser und erleichtert das Einziehen in die Schlauchhülle. Schlauchhülle beim Einführen des Atemschlauchs möglichst senkrecht halten und Silikonmuffe aus der Schlauchhülle herausziehen (Fig. 2). **Folienbeutel unbedingt entfernen.** Beide elastischen Enden der Schlauchhülle umschließen den Atemschlauch am jeweiligen Übergang zur Silikonmuffe. oxyhero select CPAP Schlauchhülle **nicht** über das Ausatemventil ziehen.

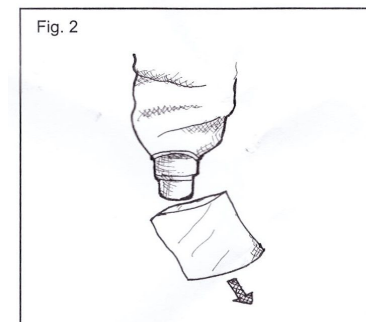

Reinigung: Schlauchhülle nach Bedarf wie folgt reinigen: Atemschlauch aus der Schlauchhülle ziehen. Schlauchhülle mit einem milden Waschmittel in warmem Wasser waschen. Mit sauberem Wasser alle Waschmittelrückstände gut ausspülen. Schlauchhülle auswringen und zum Trocknen aufhängen. Schlauchhülle nicht schleudern, nicht elektromechanisch trocknen und nicht bügeln. Trockene Schlauchhülle wie im Abschnitt **Gebrauch** beschrieben, wieder auf den Atemschlauch ziehen.

Hinweis: Plastikbeutel von Kindern fernhalten!