


Die Anwendung von somnipax guard bei Überbiss (mandibuläre Retrognathie)

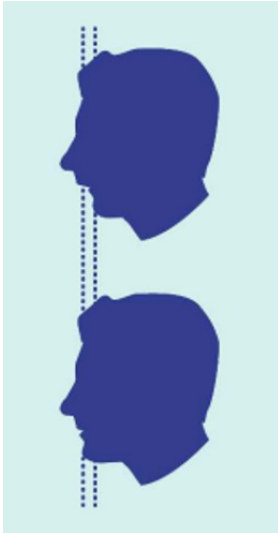

Wer unter starkem Überbiss leidet (Abbildung 1), für den können die Standard-Bänder einer Schnarchschiene im Einzelfall zu kurz sein. Denn mithilfe der Bänder wird der Vorschub des Unterkiefers eingestellt; ist der Unterkiefer von Natur aus sehr weit nach hinten versetzt, so würde ihn selbst die längste Bandlänge so weit nach vorne ziehen, dass dies unangenehm beim Tragen sein kann.

Abbildung 1

Mit somnipax guard lässt sich dieses Problem elegant lösen. Man nimmt Band Nr. 6 zur Hand (= das längste Band) und schneidet es in zwei Teile; und zwar so, wie in (Abbildung 2) aufgezeichnet. Dadurch erhält man zwei getrennte Bänder, die man dann ganz normal in den Somnofit einhängt (Abbildung 3). Diese Bänder sind extra lang und bewirken, dass der Unterkiefer nur sehr moderat nach vorne gezogen wird. Also die ideale Lösung für Personen mit starkem Überbiss.

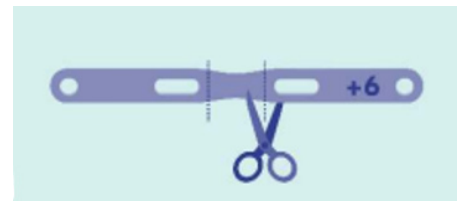


Abbildung 2



Abbildung 3