



Nasenspreizer

Nasenspreizer sind ein hervorragendes Hilfsmittel, um die Atmung durch die Nase zu verbessern – tagsüber und auch nachts. Es gibt folgende unterschiedliche Bauformen:

Flügelform

**S****M****L**

Modell somnipax air, flügel förmiger Nasenspreizer
(Probierpack mit 3 Größen [S/M/L])

Flügel förmige Nasenspreizer werden etwas tiefer in den Nasenvorhof geschoben, d.h. sie weiten die Nasenatemwege in einem längeren Bereich auf als röhren förmige Nasenspreizer. Sie sind besonders effektiv, wenn die Beeinträchtigung des Luftstroms tiefer in der Nase sitzt, etwa bei Nasenscheidewandverkrümmungen. Mit ihrer aerodynamisch optimierten Flügel form verbessern sie die Nasenatmung sehr wirksam.

Besonders geeignet für Personen mit:

- tiefer sitzenden Engstellen im Nasenvorhof
- hohen Performance-Erwartungen an den Nasenspreizer (insbesondere beim Sport)
- Nasenscheidewandverkrümmung

Röhren- oder Zylinderform



Modell somnipax breathe, röhrenförmiger Nasenspreizer (1 Nasenspreizer Einheitsgröße)

Röhrenförmige Nasenspreizer werden flach in die Nasenlöcher geschoben, d.h. nur in den unteren Bereich des Nasenvorhofs. Mit ihrer Röhrenform spreizen sie den Nasenvorhof besonders gut auf. Zudem zeichnen sie sich durch sehr hohen Tragekomfort aus, weil sie den Gewebedruck gleichmäßig verteilen und es praktisch nicht zu Druckstellen kommen kann.

Besonders geeignet für Personen mit:

- instabilen Nasenflügeln
- einem sensiblen Druckempfinden im Nasenbereich
- verengtem Nasenvorhof



**Röhrenförmiger
Nasenspreizer
speziell für Allergiker**



Modell somnipax pure, röhrenförmiger Nasenspreizer für Allergiker (1 Nasenspreizer Einheitsgröße, 24 Filtereinsätze)

Nasenspreizer in Röhrenform gibt es auch speziell für Allergiker mit Filtereinsatz. Bei diesen werden innen in die Röhren kleine Filter eingesetzt, die Pollen und Staub aus der eingesogenen Atemluft filtern, ehe diese die Schleimhäute in den oberen Atemwegen passiert. Die Filter können nach Bedarf gewechselt werden.



**Röhrenförmiger
Nasenspreizer mit
„Dübelwirkung“ für
extra stabilen Sitz**



Modell oxyhero push, röhrenförmiger Nasenspreizer mit extra stabilem Halt (Probierpack mit 3 Größen [S/M/L])

Für einen besonders sicheren Sitz gibt es den Röhren-Nasenspreizer mit „Dübel-System“. An den Röhren sind außen jeweils zwei (abtrennbare) Flügel angebracht. Diese spreizen sich nach dem Einsetzen in den Nasenvorhof leicht auf und schaffen eine leichte Dübel-Abspreizwirkung. So sitzt der Nasenspreizer noch sicherer.

So funktioniert ein Nasenspreizer

Ein Nasenspreizer weitet die Nasenflügel im Bereich des Nasenvorhofs mechanisch auf und verbessert so den Atemluftstrom beim nasalen Ein- und Ausatmen. Besonders effektiv wirkt der Nasenspreizer bei Personen, deren Nasenflügel eine geringe Grundspannung aufweisen, d.h. wo die Nasenflügel bei starkem nasalen Einatmen kollabieren. Auch bei Personen mit Nasenscheidewandverkrümmungen kann der Nasenspreizer eine starke Verbesserung der Atmung bewirken.



Alle Nasenspreizer können Sie in Deutschland / Österreich in jeder Apotheke kaufen.

Einfach den Namen des gewünschten Nasenspreizers nennen, oder die PZN Nummer angeben.

Modell	PZN (für Bestellung in Apotheke)
somnipax breathe (1 Nasenspreizer UNI)	DE 14343488 AT 4550074
somnipax pure (1 Nasenspreizer UNI, 24 Filter)	DE 14343465 AT 4165672
oxyhero push (3 Nasenspreizer S/M/L)	DE 14343086 AT 4165519
somnipax air (3 Nasenspreizer S/M/L)	DE 14343502 AT 4576205

Die Nasenspreizer kosten – je nach Modell und Packungsgröße – zwischen 10 EUR und 20 EUR.

Alternativ können Sie die Nasenspreizer auch bequem bei SomniShop im Internet kaufen.

Unter www.somnishop.com

Interesse an mehr Infos und Aktionen zur Schlafgesundheit?
Social Media Kanäle abonnieren und nichts mehr verpassen!

 facebook



 Instagram



 YouTube



Herausgeber: health.On Ventures GmbH,
Im Gewerbegebiet 5,
91093 Heßdorf,
Deutschland
Stand: 22.05.2025



01ME0016