



somnipax

shield



Anti-Schnarchmundstück gegen einfaches Schnarchen

somnipax shield ist ein dünnes Schild, das in den Bereich zwischen Lippen und Frontzähnen (Mundvorhof) eingesetzt wird. Es blockiert die Mundatmung und verhindert velares Schnarchen.

- **Komfortabel:** dank angenehm weichem Material und einer volumenreduzierten Bauform passt sich das Mundstück Ihrer natürlichen Kieferstellung an und macht die tägliche Anwendung sehr komfortabel.
- **Effektiv:** somnipax shield unterbindet wirksam die Atmung durch den Mund, die im Bereich des Gaumensegels Vibrationen auslösen und zu Schnarchen führen kann. Mit somnipax shield atmen Sie ganz natürlich durch die Nase.
- **Einfach:** das Mundstück ist gezielt einfach konstruiert und auf das Wesentliche reduziert. Das erleichtert die tägliche Anwendung und macht somnipax shield besonders hygienisch und langlebig.

Wie wirkt ein Mundstück?

Schnarchgeräusche entstehen, wenn sich das Gewebe in den oberen Atemwegen im Schlaf entspannt und erschlafft. Das Erschlaffen des Gewebes kann an mehreren Stellen im Mund- und Rachenraum auftreten.

Fällt die Gewebespannung am Gaumensegel ab, so kann es durch die vorbeiströmende Atemluft in Schwingungen versetzt werden. In diesem Fall ist die Vibration des Gaumensegels die Ursache des Schnarchens (hier wird auch von sog. velarem Schnarchen gesprochen, bisweilen auch von Mundschnarchen).



Ein Mundstück wie somnipax shield verhindert sehr effektiv, dass die über den Mund ein- und ausströmende Atemluft das Gaumensegel in Schwingungen versetzen kann.



Wie das geht? Das Mundstück wird in den äußeren Mundvorhof zwischen Lippen und Frontzähnen eingesetzt und ist am Oberkiefer fixiert (der Unterkiefer kann sich weiterhin frei bewegen). Öffnet sich der Mund im Schlaf, verhindert das Mundstück als Barriere die Atmung durch den Mund. Stattdessen atmet man natürlich durch die Nase.

Wichtig zu wissen!

In vielen Fällen stellt der Mensch im Schlaf unbewusst auf Mundatmung um, weil seine Nasenwege verengt oder verstopft sind. Um somnipax shield benutzen zu können, müssen die Atemwege in der Nase aber frei sein.

Sollten Sie Probleme mit der Nasenatmung haben, sprechen Sie deshalb bitte Ihre Ärztin / Ihren Arzt darauf an, bevor Sie eine Therapie mittels Mundstück beginnen.

Das ist somnipax shield



somnipax shield ist ein Mundstück aus thermoplastischem Kunststoff, das vor der ersten Anwendung einmalig (mittels warmem Wasserbad) angepasst wird.

Wenn das Mundstück im Mundvorhof eingesetzt ist, ermöglicht es den vollständigen Lippenschluss und verhindert zuverlässig die Mundatmung und damit velares Schnarchen.



Ergebnisse einer klinischen Studie mit somnipax shield:

98% der Nutzer empfinden das Mundstück als äußerst angenehm beim Tragen.

78% der chronischen Schnarcher konnten ihr Schnarchen mithilfe des Mundstücks vollständig eliminieren oder erfolgreich minimieren.

100% der Nutzer schafften es ohne nennenswerte Probleme, das Mundstück erfolgreich selbst anzupassen.

Untersuchung mit 77 chronischen Schnarchern: Veres E., 'Clinical trial of an oral vestibular shield for the control of snoring', J Dent Assoc S Afr., 1993, vol. 48, no. 1: 15-7.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9511609/>

Ihr Weg zu somnipax shield

Ihre Ärztin / Ihr Arzt bespricht mit Ihnen, ob das Mundstück für Sie in Frage kommt.


Gegen eine Anwendung sprechen:

- Keine ausreichend stabile Verankerung am Oberkiefer (z.B. herausnehmbare Voll- oder Teilprothese; weniger als 4 der 6 Frontzähne fest sitzend)
- Nächtliche Zahnspange im Frontzahnbereich
- Schwer und dauerhaft beeinträchtigte Nasenatmung
- Akute Entzündungen oder Verletzungen im Mund oder Zahnbereich (hier aber nur vorübergehender Ausschluss)

Die Anpassung von somnipax shield ist schnell und einfach.



Das Mundstück besteht aus thermoplastischem Kunststoff. Dieser ist bei Körpertemperatur flexibel und biegsam, aber formstabil. In warmem Wasser erwärmt, wird er weich und formbar.

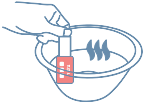

Wasser auf die Zieltemperatur erhitzen. Das Mundstück nach Anleitung eintauchen und erwärmen.



Anti-Schnarchmundstück am Oberkiefer einsetzen, fest andrücken, Lippen schließen und die gesamte Luft aus dem Mundraum saugen. Das Mundstück passt sich dem Zahnbild und der Form des Mundvorhofs an und härtet innerhalb von wenigen Sekunden aus.



Der Anpassungsprozess lässt sich bei Bedarf mehrmals wiederholen, bis das Mundstück ohne jegliches Störgefühl perfekt sitzt.

Die Vorzüge von somnipax shield auf einen Blick

Kaum spürbar



Anti-Schnarchmundstück ist angenehm weich und flexibel; wird in den Mundvorhof zwischen Lippen und Frontzähnen eingesetzt und am Oberkiefer fixiert. Unterkiefer und Zunge bleiben frei beweglich und in ihrer natürlichen Stellung.

Geprüfte Materialien - ohne Weichmacher



CE-gekennzeichnet und aus thermoplastischen Kunststoffen gefertigt, die in den USA (FDA) und in der EU für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen sind. Material frei von Weichmachern wie BPA.

Einfach



Das Mundstück ist gezielt einfach konstruiert und auf das Wesentliche reduziert; erleichtert Anpassung und Anwendung und macht das Produkt hygienisch und langlebig.

Diskret



Das Mundstück ist sehr leicht und dünn; es wird an das Zahnbild angepasst. Danach beim Tragen praktisch von außen nicht wahrzunehmen.

Sofort einsatzbereit



somnipax shield kann schnell und einfach in der Arztpraxis oder zu Hause angepasst werden; nach der Anpassung sofort einsatzbereit.

somnipax shield: das komfortable Anti-Schnarchmundstück für Ihren ruhigen Schlaf



“somnipax shield ähnelt von seiner Form dem Zahnschutz eines Boxers - nur deutlich kleiner und dünner. Für all diejenigen, die schnarchen, weil ihr Gaumensegel vibriert, ist das Mundstück eine sehr komfortable Lösung, die man kaum spürt.”

DR. HANNES WAKONIG

Geschäftsführer AescuBrands
Hersteller von somnipax shield

Wenn Sie unter velarem Schnarchen leiden (d.h. ausschließlich bei geöffnetem Mund schnarchen - und das unabhängig von der Liegeposition), sprechen Sie bitte Ihre Ärztin / Ihren Arzt auf somnipax shield an. Er wird gemeinsam mit Ihnen prüfen, ob die Therapie mittels Mundstück für Sie geeignet ist.

Ihr Ansprechpartner:

Arztstempel

**Interesse an mehr Infos und Aktionen zur Schlafgesundheit?
Social Media Kanäle abonnieren und nichts mehr verpassen!**



Herausgeber: AescuBrands UG (haftungsbeschränkt),
Im Gewerbegebiet 5, 91093 Heßdorf, Deutschland

Stand: 28.04.2025



01ME0071