


# somnipax guard standard

Unterkieferprotrusionsschiene

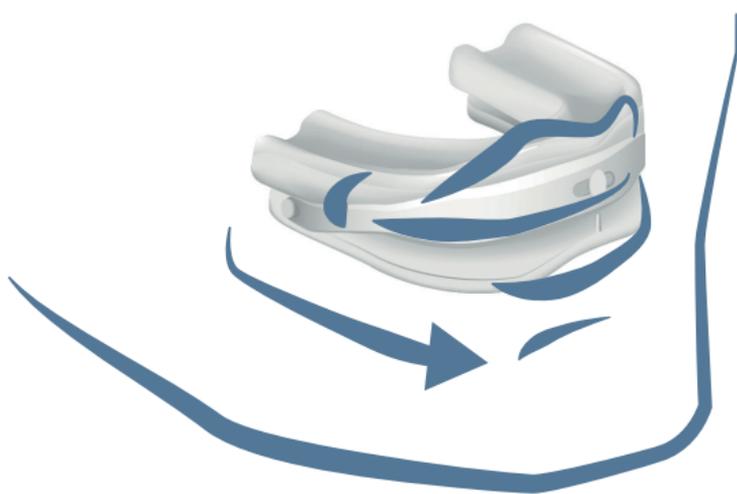

## Schnarchschiene gegen einfaches Schnarchen und nächtliche Atemaussetzer


Unterkieferprotrusionsschiene zur Anwendung bei lageabhängiger obstruktiver Schlafapnoe (OSA) sowie bei Zungen- und Grundsnarchen

- **Hoher Komfort beim Tragen:** dank angenehm weichem Material und einer volumenreduzierten Bauform, bei der man nur wenig Material im Mund spürt.
- **Sehr flexibel in der Anwendung:** wird individuell an den Kiefer angepasst; Schiene hat variable Breite und präzise verstellbaren Vorschub.
- **Sofort einsatzfähig:** die Schiene wird vor Ort in der Arztpraxis angepasst und kann vom Patienten direkt mit nach Hause genommen und verwendet werden.


## Wie wirkt eine Unterkieferprotrusionsschiene (“Schnarchschiene”)?

Schnarchgeräusche, aber auch nächtliche Atemaussetzer (“Apnoen”) entstehen, wenn sich das Gewebe in den oberen Atemwegen im Schlaf entspannt und erschlafft.

In vielen Fällen führt diese Entspannung dazu, dass die Zunge beim Schlaf in Rückenlage nach hinten in den Rachen sinkt und dort die Atemwege verengt oder sogar zeitweise verschließt. An der Engstelle kommt es zu Luftverwirbelungen und Vibrationen. Sie verursachen das Schnarchgeräusch. Werden die Atemwege vollständig verschlossen, kommt es zu Atemaussetzern.

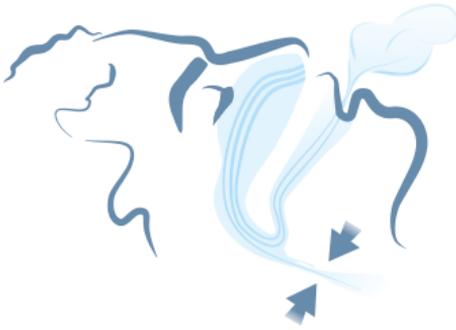

Eine Unterkieferprotrusionsschiene wie somnipax guard standard verhindert sehr effektiv, dass die Zunge im Schlaf überhaupt nach hinten in den Rachen sinken kann.

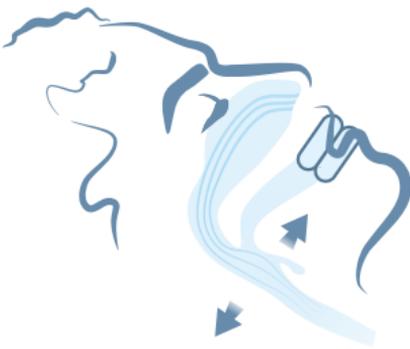

Wie das geht? Indem sie den Unterkiefer wenige Millimeter nach vorne verlagert und damit den Zungenmuskel leicht unter Spannung setzt. Wegen dieser leichten Spannung kann der Zungenmuskel nicht mehr nach hinten in den Rachen sinken. Die Atemwege bleiben frei. Sie schlafen frei von gefährlichen Atemunterbrechungen und lästigen Schnarchgeräuschen.

## Das ist somnipax guard standard




Die Oberkieferschiene wird an die Form der oberen Zahnreihe angepasst, die Unterkieferschiene an die der unteren Zahnreihe.

### Verbindung über die Bänder

Beide Einzelschienen sind über das Vorschubband aus Kunststoff miteinander verbunden. Es stellt den Vorschub sicher, erlaubt aber eine Bewegung des Unterkiefers zu den Seiten hin und ein leichtes Öffnen des Kiefers.



Über die unterschiedlichen Bandlängen von somnipax guard standard lässt sich der Vorschub regulieren. Von einer neutralen Kieferposition (0 mm) bis zu einer Protrusion von 12mm.

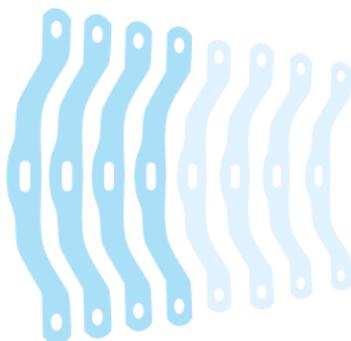

## So wird somnipax guard standard angepasst



Ihr Arzt ermittelt im Anamnesegespräch, ob Sie für eine Schienentherapie in Frage kommen.

### **Folgende Punkte sprechen gegen eine Schienentherapie:**

- herausnehmbare Zahnprothese oder schlecht haftende Teilprothese;
- Schmerzen im Kiefergelenk;
- Zahnfleischschwund oder Zahnlockerungen;
- je Kiefer weniger als 10 Zähne;
- nicht anzuwenden bei Personen unter 18 Jahren.

Die endgültige Entscheidung darüber, ob die Schiene für Sie in Frage kommt, trifft aber Ihr behandelnder Arzt.

Die Anpassung der Schiene erfolgt direkt in der Praxis. Dabei wird zunächst die Oberkieferschiene auf Ihre Zahnreihe im Oberkiefer angepasst.



Danach wird der Vorgang für die Unterkieferschiene wiederholt. Schließlich stellt der Arzt den für Sie richtigen Vorschub ein und die Schiene ist einsatzbereit.

Aufgrund der vorgefertigten Komponenten und modernster Werkstoffe dauert die Anpassung nur wenige Minuten und Ihre Schiene ist danach direkt einsatzbereit. Weitere Kontrolltermine im Nachgang bespricht der Arzt direkt mit Ihnen.


## Die Vorzüge von somnipax guard standard auf einen Blick



**Sie spüren nur wenig Material im Mund:** die natürliche Öffnung des Kiefers in Ruheposition beträgt ca. 4 mm; tragen Sie somnipax guard standard, so bleibt der Kiefer ca. 6 mm geöffnet - Sie spüren die Bisshöhe der Schiene kaum!



**Geprüfte Materialien und garantierte Schadstofffreiheit:** somnipax guard standard wird in der Schweiz unter strengen Auflagen hergestellt. Alle Inhaltsstoffe sind biokompatibel und schadstofffrei.

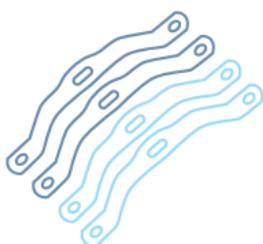

**Eine Schiene - viele Anwendungssituationen:** der Vorschub der Schiene lässt sich über die unterschiedlichen Bandlängen individuell anpassen. Ihr Arzt kann Sie bei der Titration optimal auf die Schiene einstellen.



**Gelebte Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz:** für alle Komponenten von somnipax guard standard gibt es Ersatzteile. Garantiert.



**Sofort einsatzbereit:** Sie können die Schiene direkt nach der Anpassung durch den Arzt mit nach Hause nehmen und mit der Therapie beginnen.

*«Mit der Schiene somnipax guard standard sind meine nächtlichen Atemaussetzer nahezu vollständig verschwunden.»*



**HANS K., HERZOGENAURACH**



**Tipp:** dem QR-Code folgen und das gesamte Interview mit Hans K. auf Youtube sehen

## somnipax guard standard: ein Stück High-Tech für Ihre Gesundheit



*«In diesem Produkt stecken mehrere Jahre Entwicklung und eine enge Zusammenarbeit zwischen Mediziner, Ingenieuren und Fertigungstechnikern. somnipax guard standard vereint Schweizer Präzision mit modernsten medizinischen Hochleistungskunststoffen.»*

### **DR. HANNES WAKONIG**

Geschäftsführer AescuBrands,  
Hersteller von somnipax guard standard

Wenn Sie unter Schnarchen oder nächtlichen Atemaussetzern leiden, sprechen Sie Ihren Arzt auf somnipax guard standard an. Er wird gemeinsam mit Ihnen prüfen, ob die Schienentherapie für Sie geeignet ist.

### **Ihr Ansprechpartner:**

Arztstempel

**Herausgeber:** AescuBrands UG (société à responsabilité limitée),  
Im Gewerbegebiet 5, 91093 Heßdorf, Allemagne

**Stand:** 24.04.2024