
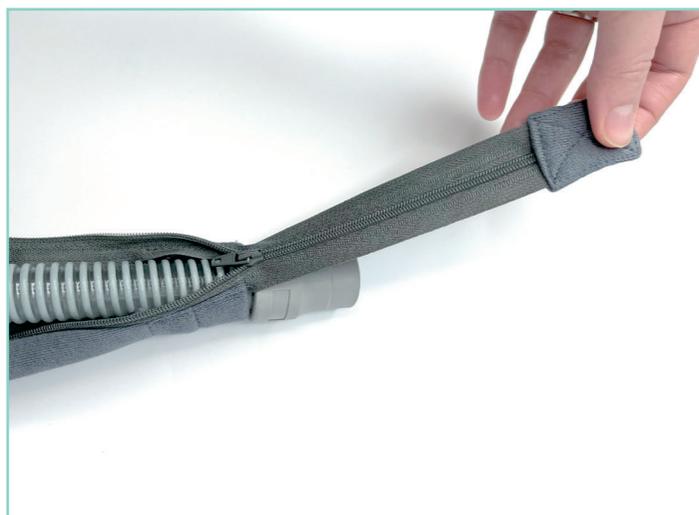


FUNDA DE MANGUERA OXYHERO CPAP

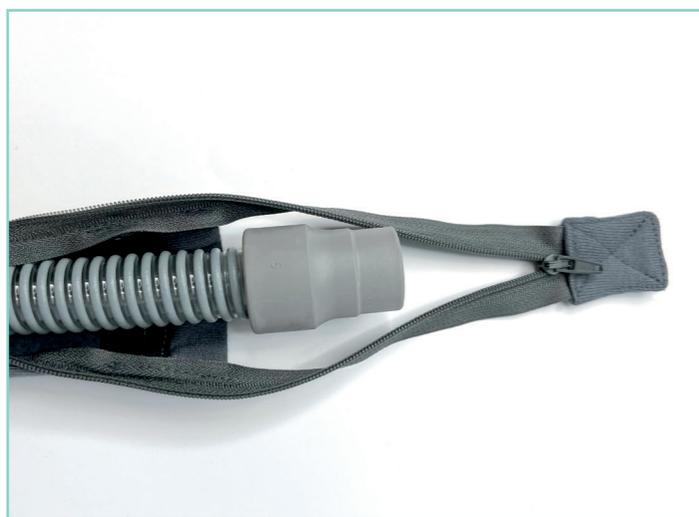

Color: antracita

Composición textil: 100 % algodón (de cultivo ecológico)

Uso: Abra la cremallera de la funda de manguera.

Introduzca el extremo de la manguera que se conectará posteriormente al dispositivo CPAP a través del extremo abierto de la cremallera (extremo inferior de la cremallera).

Antes de cerrar la cremallera, asegúrese de que los manguitos de unión a ambos lados de la funda de la manguera sobresalgan aprox. 1 cm del extremo de la funda. Cierre la cremallera.

Cierre la funda CPAP del siguiente modo: una el manguito de unión (= ahí donde el cierre de cremallera sobresale aprox. 5 cm más allá del extremo de la funda de la manguera) a su dispositivo CPAP. Una el lado opuesto (donde se encuentra el extremo superior de la cinta de cremallera, es decir, donde la cremallera termina a ras de la funda de manguera) a su mascarilla CPAP.

Instrucciones: Lavar en un ciclo de lavado normal hasta una temperatura de 40 °C. La funda no puede lavarse con lejía; solo debe lavarse con detergente de color suave. Secar en la secadora en un programa para ropa delicada.



Advertencia: No utilizar con tubos de CPAP calientes (ipeligro de incendio!).