



Sieraintenlaajentajat

Sieraintenlaajentaja on erinomainen apukeino nenähengityksen parantamiseen - päivin ja öin.

somnipax breathe **putkimallinen sieraintenlaajentaja**

(1 koko sopii kaikille)



Putkimainen malli laajentaa sieraimia erityisen hyvin nenän alaosassa

Sieraintenlaajentaja asetetaan nenään siten, että hevosenkengän muotoinen nenäupokkeita yhdistävä osa osuu nenän alaosaan ja upokkeet painetaan varovasti sieraimiin. Käyttömukavuus on erittäin korkea, koska paine jakautuu tasaisesti sieraimien alueelle eikä yksittäisiä painepisteitä muodostu.

Sopii erittäin hyvin henkilöille,


- joiden sieraimet ahtautuvat sisäänhengityksen aikana
- jotka aistivat herkästi paineen tunteen nenän alueella
- joilla on kaventunut nenän eteinen

somnipax pure **putkimallinen sieraintenlaajentaja allergikoille**

(+ 24 suodatinta, 1 koko sopii kaikille)



Putkimallinen sieraintenlaajentaja allergikoille

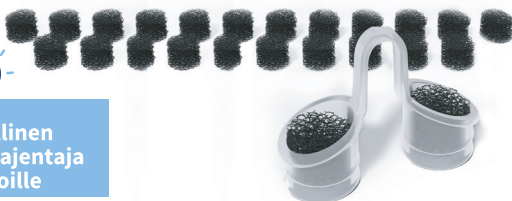

Sieraintenlaajentajasta on saatavilla oma vaihtoehto allergikoille. Tässä mallissa upokkeisiin asetetaan pienet suodattimet, jotka suodattavat sisäänhengitetystä ilmastä pölyä ja siitepölyä sekä estävät niiden pääsyn ylempiin hengitysteihin. Suodattimet voidaan vaihtaa tarpeen mukaan.

oxyhero push
ovaalinmuotoinen sieraintenlaajentaja
(3 koon kokeilupakkaus: S/M/L)



Sivuilla olevat siivekkeet
"ankkuroivat"
sieraintenlaajentajan
paikoilleen



Ovaalinmuotoinen sieraintenlaajentaja pienillä siivekkeillä takaa erityisen hyvän istuvuuden. Kun sieraintenlaajentaja on asetettu nenään, sen molemmilla puolilla olevat (irrotettavat) siivekkeet "aukeavat" kevyesti sierainten sisäseinämiä vasten ja pitävät sieraintenlaajentajan paikoillaan.

Näin sieraintenlaajentaja toimii

Sieraintenlaajentaja laajentaa sieraimia mekaanisesti nenän alaosassa ja parantaa näin nenähengitystä niin sisään- kuin uloshengityksen aikana. Sieraintenlaajentaja on erityisen tehokas apu henkilöille, joiden sieraimet painuvat yhteen voimakkaan sisäänhengityksen aikana. Se voi myös helpottaa hengitystä merkittävästi silloin, kun nenän väliseinä on vino.

Haluatko tietää lisää terveellisestä unesta ja ajankohtaisista kampanjoista?
Ota SomniShopin sometilit seurantaan ja pysy ajan tasalla!



Sieraintenlaajentajat maksavat mallista ja pakkauskoosta riippuen 10 - 20 euroa.

Voit ostaa sieraintenlaajentajat kätevästi SomniShopin verkkokaupasta: **www.somnishop.fi**

Julkaisija: health.On Ventures GmbH,
Im Gewerbegebiet 5,
91093 Heßdorf, Germany
Päivitetty: 23.05.2025



01ME0020