


oxyhero

CPAP pro

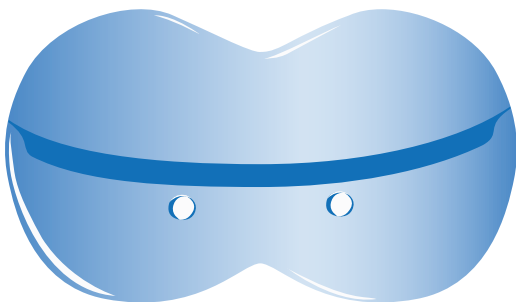

Suukoje suuvuodon ehkäisyyn CPAP-hoidon aikana

oxyhero CPAP pro -suukoje on kuin ohut kilpi, joka asetetaan suun eteiseen, hampaiden ja huulten väliin. Se estää CPAP-laitteen johtaman ilman karkaamisen suun kautta ulos.

- **Tehokas:** Suukoje estää suuvuotoa ja mahdollistaa matalamman hoitopaineen CPAP-hoidon aikana.
- **Miellyttävä:** Ilman suuvuotoa vaihdos kokokasvomaskista huomattavasti miellyttävämpään nenämaskiin on mahdollista.
- **Hellävarainen:** oxyhero CPAP pro kiinnitetään kevyesti yläleukaan; alaleuka ja kieli pysyvät vapaana ja luonnollisissa asennoissaan.


Miten suukoje estää suuvuodon?

Suuvuotoa syntyy, kun CPAP-hengitysilma poistuu suun kautta ulos. CPAP-paine laskee, eikä ylemmät hengitystiet pysy enää täysin auki - kudokset painuvat kasaan ja hengityskatkoksia esiintyy.



Nykyaikaiset CPAP-laitteet tunnistavat paineen laskun ja korjaavat sitä - nostamalla hoitopainetta. Voimakas ilmavirta kuitenkin kuivattaa ja ärsyttää limakalvoja. Seurauksena on suun kuivumista ja turvonneita limakalvoja; tämä vähentää halukkuutta jatkaa CPAP-hoitoa.

Suukoje ehkäisee CPAP-ilman poistumisen suun kautta ulos, jolloin suuvuotoa ei pääse syntymään.

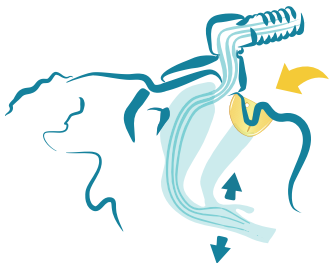

Suukoje toimii mekaanisena esteenä, joka asetetaan suun eteiseen ja joka estää ilman kulkemisen suun kautta. Tämän seurauksena ilmanpaine ylemmissä hengitysteissä pysyy tasaisena ja CPAP-hoito toimii tehokkaasti. Vaihdos huomattavasti miellyttävämpään nenämaskiin on yleensä mahdollinen.

Tämä on oxyhero CPAP pro

**oxyhero CPAP pro lisää maskihoidon
tehokkuutta 93% todennäköisyydellä**
(Magdeburgin yliopiston lääketieteellinen tutkimus*)

oxyhero CPAP pro mahdollistaa monissa tapauksissa siirtymän kokokasvomaskista nenämaskiin; käyttömukavuudesta ja hoitotehosta tinkimättä.



Suukoje on kiinnitetty yläleukaan vain kevyesti. Alaleuka ja kieli pääsevät liikkumaan vapaasti ja ne pysyvät luonnollisissa asennoissaan (toisin kuin leukaremmien kanssa, joka työntää alaleukaa ja kieltä taaksepäin, mikä kaventaa hengitysteitä entisestään).

Suukoje asetetaan suun eteiseen, jonka jälkeen suun voi sulkea täysin ongelmitta. Jos suu aukeaa nukkuessa, suukoje estää CPAP-ilman poistumisen sen kautta.

*Katso tutkimustietoja: Dr. med. Sebastian Föllner, sisätautien erikoislääkäri (yleislääkäri), Burgstall; Prevention of leakage due to mouth opening through applying an oral shield device during nasal CPAP therapy of patients with obstructive sleep apnea, Sleep Medicine 66 (2020), 168-173.

Näin pääset aloittamaan oxyhero CPAP pro -suukojeen käytön

Lääkärisi keskustelee kanssasi, onko suukoje sinulle sopiva ratkaisu.


Seuraavat asiat estävät suukojeen käytön:

- Suukojetta ei voida kiinnittää yläleukaan riittävän tukevasti (esim. irrotettava koko- tai osaproteesi; kuudesta etuhampaasta alle neljä on tukevasti paikoillaan)
- Yöllä käytettävät hammasraudat suun etuosassa
- Vaikeasti ja pysyvästi heikentynyt nenähengitys / CPAP-hengitys nenän kautta ei ole mahdollista
- Akuutti tulehdus tai haava suun tai hampaiden alueella (tässä tapauksessa käyttö on kuitenkin keskeytettävä vain tilapäisesti)

oxyhero CPAP pro -suukojeen muotoilu on nopeaa ja helppoa.



Suukoje on termoplastista muovia. Ruumiinlämmössä (suussa) se on joustavaa ja taipuisaa, mutta säilyttää muotonsa. Kun sitä lämmitetään kuumassa vesihauteessa, materiaalista tulee pehmeää ja muotoiltavaa.

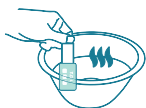

Vesi lämmitetään sopivaan lämpötilaan. Suukoje laitetaan veteen lämpenemään käyttöohjeen mukaan.



Suukoje asetetaan yläleukaan, painetaan tiukasti, suljetaan huulet ja imetään kaikki ilma suun alueelta. Suukoje mukautuu hampaiden ja suun eteisen muotoon ja kovettuu muutamien sekuntien kuluessa.



Muotoilu voidaan toistaa tarvittaessa useita kertoja, kunnes suukoje istuu täydellisesti ilman epämukavuuden tunnetta.

oxyhero CPAP pro -suukojeen edut yhdellä silmäyksellä



Lähes huomaamaton

Suukoje on miellyttävän pehmeä ja joustava; se asetetaan suun eteiseen huulten ja hampaiden väliin, ja se kiinnitetään kevyesti yläleukaan. Alaleuka ja kieli pysyvät vapaana ja luonnollisissa asennoissaan.



Testatut materiaalit - ilman muovin pehmentimiä

CE-merkitty ja valmistettu termoplastisesta muovista, joka on USA:ssa (FDA) ja EU:ssa hyväksytty olemaan kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa. Materiaali ei sisällä pehmentimiä, kuten BPA:ta.



Yksinkertainen

Suukoje on tarkoituksenmukaisesti suunniteltu yksinkertaiseksi ja pelkistetty olennaiseen; tämä helpottaa niin muotoilua kuin käyttöä, sekä tekee tuotteesta hygieenisen ja pitkäikäisen.



Hillitty ilme

Suukoje on todella kevyt ja ohut; se muotoillaan suuhun sopivaksi. Muotoilun jälkeen suukojeen käyttöä tuskin huomaa ulkoapäin katsottuna.



Heti käyttövalmis

oxyhero CPAP pro voidaan muotoilla nopeasti ja helposti kotona tai lääkärin vastaanotolla; muotoilun jälkeen se on heti käyttövalmis.

oxyhero CPAP pro: helposti eroon suuvuodosta



“Suukoje on monille kokokasvomaskin käyttäjille todella yksinkertainen ja miellyttävä tapa siirtyä nenämaskiin. Tunnetut seuraukset elämänlaadulle ovat: matalampi hoitopaine, enemmän vapauden tunnetta, parempi uni.”

TOHTORI HANNES WAKONIG

johtaja, AescuBrands
oxyhero CPAP pro
-suukojeen valmistaja

Jos kärsit suuvuodosta, keskustele oxyhero CPAP pro -suukojeen käytöstä lääkärisi kanssa. Hän varmistaa kanssasi, onko suukoje sinulle sopiva ratkaisu.

Yhteyshenkilösi:

Lääkärin leima

Haluatko tietää lisää terveellisestä unesta ja ajankohtaisista kampanjoista? Ota SomniShopin sometilit seurantaan ja pysy ajan tasalla!

 facebook



 Instagram



 YouTube



Julkaisija: AescuBrands UG (haftungsbeschränkt),
Im Gewerbegebiet 5, 91093 Heßdorf, Germany
Päivitetty: 15.05.2025



01ME0021