

Kätevä pituus 120 cm; sopii kaikkiin standardikokoisiin CPAP-letkuihin (sisähalkaisija 19 mm ja liitäntä 22 mm).

### **Käyttöohje**

1. Avaa puhdistusharja varovasti ja suorista se. Jotta harjan varsi, eli metallilanka, säilyisi mahdollisimman pitkään ehjänä ja kestäväenä, on suositeltavaa löytää sille säilytyspaikka, jonne harjan voi ripustaa.
2. Ennen harjan ensimmäistä käyttöä, pese se miedolla puhdistusaineella ja lämpimällä vedellä. Huuhtelee lopuksi kylmällä vedellä.
3. CPAP-letkun puhdistukseen käytetään mietoa puhdistusainetta (esim. SomnoSept) ja haaleaa vettä. (Haalea tai jopa kylmä vesi on suositeltavaa siksi, koska kuuma vesi voi kuivattaa muovia, eli CPAP-letkua, ja vähentää sen käyttöikää).
4. Pidä CPAP-letkua mahdollisimman suorassa välttääksesi sen kulumisen tai vahingoittumisen puhdistuksen yhteydessä. Työnnä harjaa hitaasti syvemmälle letkuun pienin edestakaisin liikkein.
5. Kun letkun ensimmäinen puoli on puhdistettu, ota harja ulos ja toista puhdistus letkun toisesta päästä.
6. Kun letku on puhdistettu, huuhtelee se huolellisesti kylmällä vedellä.
7. Kuivata letku siten, että liität sen CPAP-laitteeseen ja annat laitteen olla päällä noin 15 minuutin ajan, kunnes kaikki kosteus on haihtunut.
8. Kuivaa puhdistusharjan harjakset hellästi pyyhkeellä tai liinalla painellen ja ripusta harja sitten tilaan, jossa on riittävä ilmanvaihto.

### **Huomioitavaa / Varoitukset:**

Jotta harjan käsitteleminen olisi helppoa, on sen pituus CPAP-letkua huomattavasti lyhyempi. Tästä syystä letku puhdistetaan molemmista päistä erikseen. Harja tulee säilyttää pienten lasten ulottumattomissa. Harjan käyttöä ei tule jatkaa, mikäli harjaspää on vaurioitunut.