


somnipax guard - kuorsauskiskon edut yhdellä silmäyksellä:



Tunnet vain miellyttävän pehmeän materiaalin suussa: kiskon materiaali on pehmeää, mutta samalla se pysyy erinomaisesti muodossaan. Kisko istuu mukavan tiiviisti hampaita vasten aiheuttamatta epämukavia painaumia.



Testatut materiaalit ja taattu haitta-aineettomuus: somnipax guard valmistetaan Sveitsissä tarkkojen vaatimusten mukaisesti. Kaikki ainesosat ovat biohyhteensopivia ja ne eivät sisällä haitta-aineita.

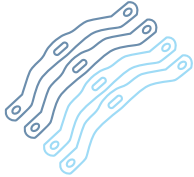

Yksi kisko - monta käyttömahdollisuutta: kiskon työntönnön määrää voi säätää yksilöllisesti eri pituisilla pannoilla. Lääkärisi voi auttaa tekemään juuri sinulle tarvittavat säädöt.



Käytössä kestävä ja kustannustehokas: kaikkiin somnipax guard - kuorsauskiskon osiin on varaosia. Taatusti.



Heti käyttövalmis: lääkärin tekemän muotoilun jälkeen voit ottaa kiskon mukaan kotiin ja aloittaa sen käytön.

“Muotoilu lääkärin vastaanotolla kävi nopeasti ja vaivatta. Kisko istuu hyvin ja tekee tehtävänsä.”

GEORG N., HASLACH



somnipax guard: kuorsauskiskojen klassikko



“somnipax guard on yksi markkinoiden kehittyneimmistä kiskoista. Erinomaisesti suunniteltu tuote, joka on nyt jo todellinen tekniikan klassikko.”

TOHTORI HANNES WAKONIG

Johtaja, AescuBrands,
somnipax guard -kuorsauskiskon valmistaja


Jos kärsit kuorsauksesta ja / tai yöllisistä hengityskatkoksista, keskustele somnipax guard -kuorsauskiskon käytöstä lääkärin kanssa. Hän varmistaa kanssasi, onko kiskohoito sinulle sopiva ratkaisu.

Yhteyshenkilösi:

Lääkärin leima

somnipax guard

Kuorsauskisko

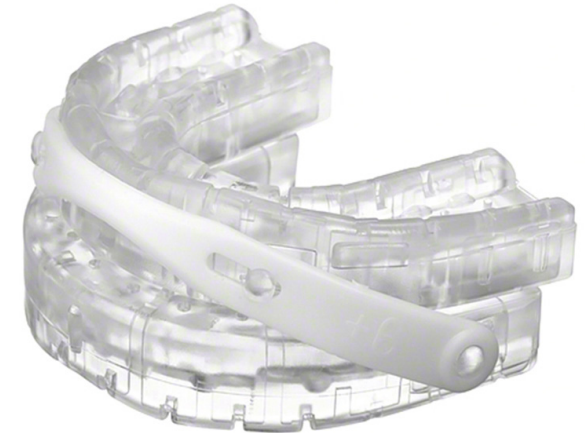

Kuorsauskisko tavallisen kuorsauksen ja yöllisten hengityskatkosten ehkäisyyn

Kisko asentoriippuvaisen obstruktiivisen uniapnean hoitoon ja kielikuorsauksen ehkäisyyn

- **Erittäin mukava käyttää:** miellyttävän pehmeä materiaali ja hyvä, tiukka istuvuus hampaita vasten.
- **Todella joustava:** muotoillaan yksilöllisesti omaan suuhun sopivaksi; sopii hyvin myös ison leuan omaaville ja henkilöille, joilla on vetäytynyt leuka; leuan työntönnön määrää voidaan säätää tarkasti.
- **Heti käyttövalmis:** kisko muotoillaan valmiiksi lääkärin vastaanotolla ja sen voi ottaa saman tien mukaan kotiin käytettäväksi.




Vinkki: skannaa QR-koodi ja katso Youtubesta, miten kuorsauskiskon muotoilu tehdään.

Julkaisija: AescuBrands UG (haftungsbeschränkt),
Im Gewerbegebiet 5, 91093 Heßdorf, Germany
Päivitetty: 01.06.2023 [versio 1.0]


Miten kuorsauskisko (ja uniapneakisko) toimii?

Kuorsausäänet ja yölliset hengityskatkokset (apneat) syntyvät, kun nukkuessa ylähengitysteiden kudokset rentoutuvat ja veltostuvat.

Useissa tapauksissa tämä veltostuminen johtaa siihen, että kieli painuu nukkuessa taaksepäin nieluun ja ahtauttaa, tai hetkellisesti jopa tukkii hengitystiet. Ahtaumakohdissa syntyy ilman pyörintää ja väreilyä, joka aiheuttaa kuorsausäänen. Jos hengitystiet tukkeutuvat täysin, seurauksena on hengityskatkoksia.

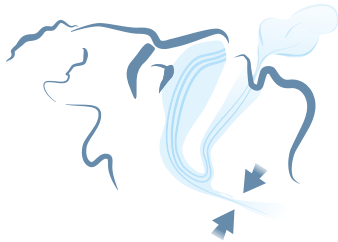

Kuorsauskisko, kuten somnipax guard, estää todella tehokkaasti kielen painumisen nieluun.

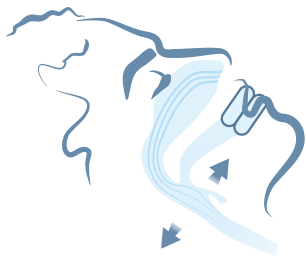

Miten se toimii? Kisko työntää alaleukaa joitakin millimetrejä eteenpäin, jolloin kielen lihakset ovat pysyvästi lievässä jännityksessä. Tällöin kieli ei pysty veltostumaan täysin niin, että se painuisi taaksepäin nieluun. Hengitystiet pysyvät vapaana. Uni on rauhallista ilman vaarallisia hengityskatkoksia ja ärsyttävää kuorsautsa.


Tämä on somnipax guard




Kiskon yläosa muotoillaan ylähampaisiin, kiskon alaosa alahampaisiin sopivaksi.

Yhdistäminen pantojen avulla

Kiskon ylä- ja alaosa yhdistetään toisiinsa muovisilla pannoilla. Pannat varmistavat leuan eteenpäin työntymisen, mutta mahdollistavat samalla leuan sivuttaiset liikkeet ja suun avaamisen.

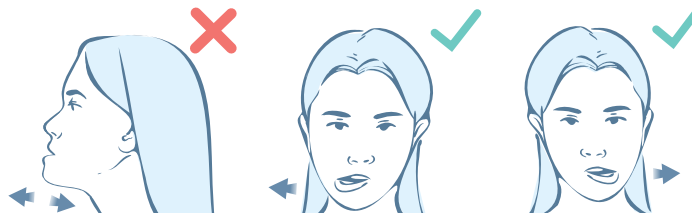

Leuan työntöä voidaan säätää somnipax guard -kiskon eripituksilla pannoilla leuan lähes luonnollisesta asennosta (3 mm) jopa 10,5 mm asti. Lisäksi on olemassa erikoispituus, jonka avulla saavutetaan jopa ns. negatiivinen ~ 2 mm työntö.

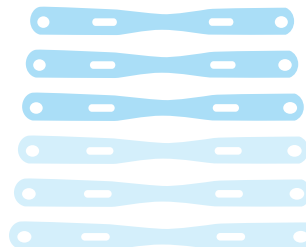

Näin somnipax guard muotoillaan



Lääkärisi keskustelelee kanssasi, onko kiskohoito sinulle sopiva ratkaisu.

Seuraavat asiat estävät kuorsauskiskon käytön:

- irrotettava hammasproteesi tai huonosti pysyvä osaproteesi
- kivut leukanivelessä
- vetäytyneet ikenet tai heiluvat hampaat
- alle 10 hammasta ylä- tai alahampaissa
- alle 18 vuoden ikä

Lopullisen päätöksen siitä, onko kiskon käytön aloittaminen kohdallasi mahdollista, tekee hoitava lääkärisi.

Kiskon muotoilu tehdään suoraan lääkärin vastaanotolla. Ensin muotoillaan ylähampaisiin tarkoitettu kiskon osa.



Seuraavaksi muotoilu toistetaan kiskon alahampaisiin tarkoitettulle osalle. Lopuksi lääkäri säätää leuan työntönnön määrän sinulle sopivaksi, ja kisko on valmis käytettäväksi.

Ennalta valmistettujen osien ja nykyaikaisten materiaalien ansiosta muotoilu kestää vain joitakin minuutteja, jonka jälkeen kisko on heti käyttövalmis. Lääkäri keskustelelee jatkotoimenpiteistä suoraan kanssasi.