
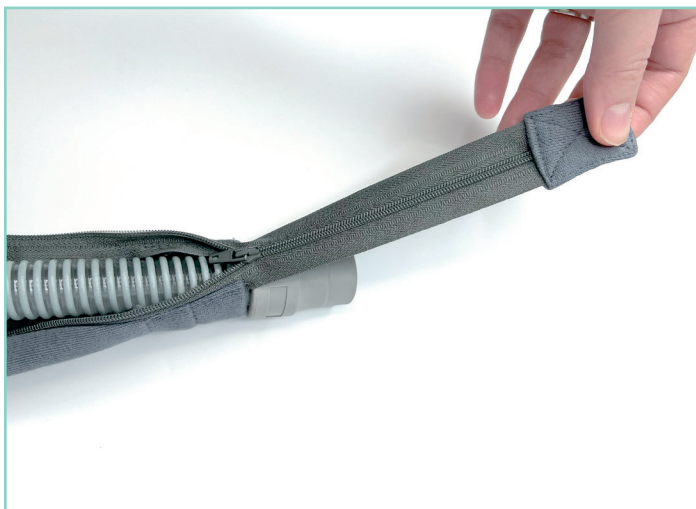


HOUSSE DE TUYAU CPAP/PPC OXYHERO

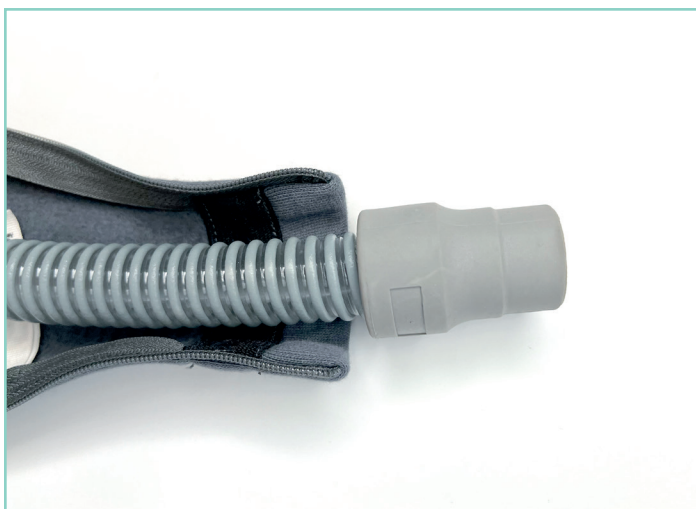

Couleur : anthracite

Composition : 100 % coton (issu de l'agriculture biologique)

Mode d'emploi : Ouvrez entièrement la fermeture à glissière de la housse de tuyau.

Placez le tuyau dans la housse en veillant à ce que l'extrémité qui sera raccordée à l'appareil de ventilation en PPC se trouve du côté où le curseur se situe lorsque la fermeture est ouverte (à l'extrémité dite inférieure du ruban de la fermeture).

Avant de refermer la fermeture à glissière, assurez-vous que les manchons se situent à environ 1 cm de chaque extrémité de la housse.

Refermez la fermeture à glissière.

Branchez le tuyau CPAP/PPC de la manière suivante : raccordez le manchon situé à l'extrémité inférieure (celle où le ruban de la fermeture à glissière dépasse d'environ 5 cm de l'extrémité de la housse) à l'appareil de ventilation. Le manchon situé à l'extrémité opposée (celle où le ruban de la fermeture ne dépasse pas de l'extrémité de la housse) sera branché au masque.

Notes : Lavage en machine, en cycle normal à 40 °C maximum. Ne pas utiliser d'agents de blanchiment ni de lessive spéciale pour le linge blanc, utiliser de la lessive pour le linge de couleur ou délicat. En cas de séchage au sèche-linge, veiller à choisir le programme « linge délicat ».



Avertissement : Ne pas utiliser avec un tuyau CPAP/PPC chauffant (risque d'incendie !).