


Orthèse d'avancée mandibulaire disponible en deux tailles

somnipax guard standard

(pour les mâchoires de
taille moyenne)

somnipax guard large

(pour les mâchoires plus
grandes)

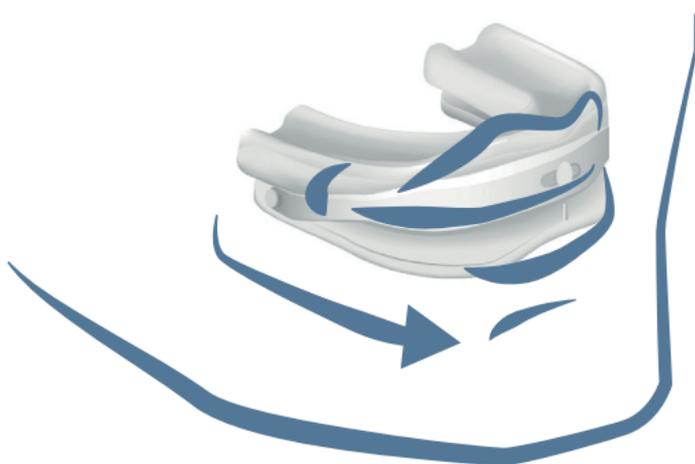

Orthèse anti-ronflement contre le ronflement simple et les arrêts respiratoires nocturnes

Orthèse d'avancée mandibulaire (OAM) destinée au traitement de l'apnée obstructive du sommeil (AOS) positionnelle et du ronflement de la langue

- **Niveau de confort élevé** : matériau souple, agréable en bouche et conception peu volumineuse qui lui permettent de se faire discrète lorsqu'elle est portée
- **Ajustement optimal** : disponible en deux tailles (normale / extra large) ; ajustement individuel de l'orthèse à la mâchoire de l'utilisateur
- **Précision et flexibilité** : niveau d'avancée mandibulaire réglable précisément pour obtenir la contrainte la plus faible possible sur l'articulation de la mâchoire
- **Immédiatement prête à l'emploi** : ajustable par l'utilisateur lui-même, ou par son médecin, après immersion dans un bain d'eau chaude, puis utilisable immédiatement

Comment fonctionne une orthèse d'avancée mandibulaire (orthèse anti-ronflement) ?

Les ronflements, mais aussi les arrêts respiratoires nocturnes (« apnées »), se produisent lorsque les tissus des voies respiratoires supérieures se détendent et se relâchent pendant le sommeil.

Dans de nombreux cas, ce relâchement entraîne un affaissement de la langue du patient dans son pharynx lorsqu'il dort sur le dos. Ses voies respiratoires sont alors partiellement, voire complètement obstruées (de façon temporaire). Des tourbillons d'air et des vibrations se produisent à l'endroit où le passage s'est resserré, provoquant ainsi le ronflement. Lorsque ses voies respiratoires sont complètement obstruées, des arrêts respiratoires surviennent.



Une orthèse d'avancée mandibulaire comme l'orthèse somnipax guard (standard / large) empêche très efficacement la base de la langue de s'affaisser dans le pharynx pendant la nuit.



Comment cela fonctionne-t-il ? En déplaçant la mâchoire inférieure de quelques millimètres vers l'avant et en exerçant ainsi une légère tension sur le muscle de la langue. En raison de cette légère tension, la langue ne peut plus s'enfoncer dans la gorge. Les voies respiratoires restent libres. Vous dormez sans interruptions dangereuses de la respiration et sans bruits de ronflement gênants.

Voici les orthèses somnipax guard standard et somnipax guard large

De conception identique, elles se différencient l'une de l'autre principalement par leur taille et, dans une moindre mesure, par les niveaux d'avancée mandibulaire disponibles.



La partie supérieure de l'orthèse est ajustée à la forme de la rangée de dents supérieure, la partie inférieure à celle de la rangée de dents inférieure.

Deux parties reliées par une bande souple


Les deux parties de l'orthèse (supérieure / inférieure) sont reliées entre elles par la bande en plastique au moyen de laquelle le niveau d'avancée est réglé. Celle-ci assure l'avancée de la mâchoire inférieure (mandibule) tout en permettant les mouvements latéraux ainsi qu'une ouverture aisée de la bouche.



Les bandes de longueurs différentes des orthèses somnipax guard (standard / large) permettent de régler l'avancée mandibulaire :

somnipax guard standard : d'une position neutre de la mâchoire (0 mm) à une protrusion de 12 mm.

somnipax guard large : d'une position en retrait de la mâchoire (-1 mm) à une protrusion de 9,5 mm.

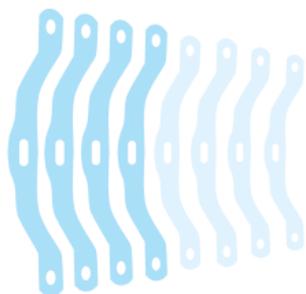

Voici comment est réalisé l'ajustement des orthèses somnipax guard (standard / large)



Votre médecin détermine, lors d'un entretien concernant vos antécédents médicaux, si vous êtes éligible à un traitement par orthèse d'avancée mandibulaire.

Ce traitement est contre-indiqué dans les cas suivants :

- prothèse dentaire amovible ou prothèse partielle mal fixée ;
- douleurs dans l'articulation de la mâchoire ;
- récession gingivale, déchaussement des dents ;
- moins de 10 dents présentes sur la mâchoire inférieure ou supérieure ;
- âge inférieur à 18 ans.

C'est votre médecin qui décidera en dernier ressort si un traitement par orthèse est envisageable dans votre situation.

Vous déterminez la taille de votre mâchoire à l'aide du guide des tailles et en déduisez quel modèle vous convient (standard ou large). Par la suite, l'orthèse peut être ajustée par vous-même, chez vous, ou par votre médecin.



La partie supérieure de l'orthèse est ajustée à votre arcade supérieure après avoir été immergée dans un bain d'eau chaude. Puis le processus est répété pour la partie inférieure de l'orthèse. Enfin, vous réglez l'avancée au niveau qui vous convient et l'orthèse est prête à être utilisée. Le cas échéant, votre médecin contrôle que le niveau d'avancée a été réglé adéquatement.

Grâce à des composants préfabriqués et des matériaux parmi les plus modernes, l'ajustement ne prend que quelques minutes et votre orthèse est aussitôt prête à l'emploi.


Les atouts de l'orthèse somnipax guard (standard / large) en bref




Peu volumineuse : l'ouverture naturelle de la mâchoire au repos est d'environ 4 mm ; avec l'orthèse somnipax guard (standard ou large), la mâchoire reste ouverte de quelque 6 mm. Son épaisseur se fait donc à peine sentir en bouche !



Matériaux contrôlés et absence garantie de substances nocives : les orthèses somnipax guard standard et large sont fabriquées en Suisse dans le respect de conditions strictes. Tous leurs composants sont biocompatibles et exempts de substances nocives.

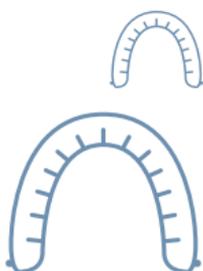

Un ajustement optimal, en quelques gestes : l'utilisateur détermine à l'aide du guide des tailles quelle taille d'orthèse convient à sa mâchoire (standard pour les mâchoires de taille moyenne, large pour les mâchoires plus grandes que la moyenne). Dans un second temps, l'orthèse est ajustée à sa dentition - une opération simple qui ne prend que quelques minutes.

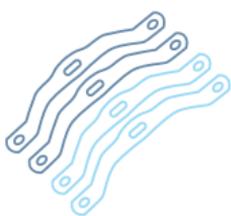

S'adapte au patient : le niveau d'avancée des orthèses peut être facilement réglé par l'utilisateur grâce au jeu de bandes de longueurs différentes. Le cas échéant, son médecin contrôle que le niveau d'avancée a été réglé de manière optimale.



Durable et économique : des pièces de rechange sont disponibles pour tous les composants des orthèses somnipax guard standard et large. C'est garanti !



Prête à l'emploi immédiatement : l'orthèse peut être utilisée aussitôt après avoir été ajustée. Le traitement peut donc commencer immédiatement.

Orthèses somnipax guard : la haute technologie au service de votre santé



« Ces orthèses sont le fruit de plusieurs années de recherche et de collaboration étroite entre médecins, ingénieurs et techniciens de fabrication. Elles allient la précision suisse aux matériaux synthétiques de qualité médicale les plus modernes et les plus performants. »

HANNES WAKONIG, PhD

Gérant de AescuBrands,
fabricant des orthèses somnipax



« Grâce à l'orthèse somnipax guard standard, mes apnées nocturnes ont presque totalement disparu. »

HANS K., HERZOGENAURACH

Si vous ronflez ou souffrez d'arrêts respiratoires nocturnes, parlez des orthèses somnipax guard (standard / large) avec votre médecin. Il examinera avec vous si ce traitement est adapté à votre situation.

Contact :

Cachet

Éditeur : AescuBrands UG (responsabilité limitée),
Im Gewerbegebiet 5, 91093 Hessdorf, Allemagne

Version : 1.0 (15/11/2024)