


FODERA PER TUBO CPAP OXYHERO

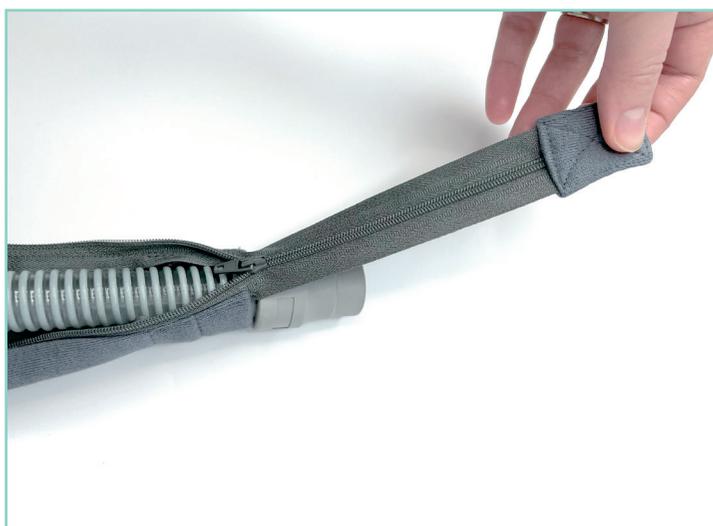

Colore: antracite

Composizione del tessuto: 100% cotone (da coltivazione biologica)

Modo d'uso: Aprire la cerniera lampo della fodera per tubo. Inserire l'estremità del tubo che verrà successivamente collegata al dispositivo CPAP attraverso l'estremità aperta della cerniera lampo (estremità inferiore della fettuccia).

Prima di chiudere la cerniera, assicurarsi che i manicotti di collegamento su entrambi i lati della fodera sporgano di circa 1 cm oltre l'estremità della stessa.

Chiudere la cerniera lampo.

Collegare il tubo CPAP come segue: collegare il manicotto che si trova all'estremità inferiore della fettuccia (= dove la cerniera sporge di circa 5 cm oltre l'estremità della fodera) al vostro dispositivo CPAP. Il lato opposto (dove si trova l'estremità superiore della cerniera, cioè dove la cerniera termina all'altezza della fodera per tubo) va collegato alla vostra maschera CPAP.

Note: Lavare con ciclo normale fino a una temperatura di 40°C. La fodera per tubo non può essere trattata con candeggina, ma deve essere lavata solo con detersivi per delicati e colorati. Asciugare in asciugatrice con il programma per delicati.



Avvertenze: Non utilizzare con tubi CPAP riscaldati (rischio di incendio!).