




somnipax
shield

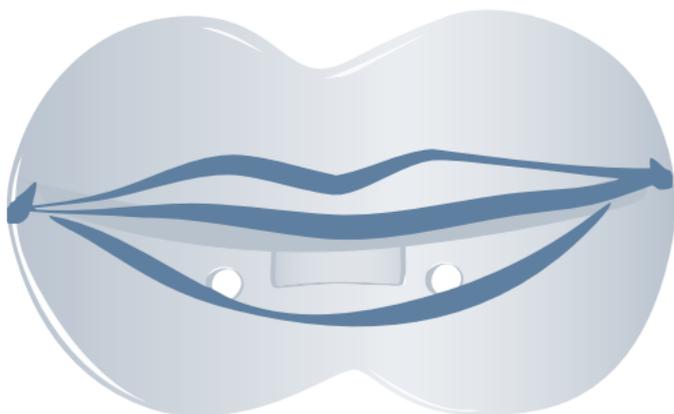

Boccaglio contro il russamento semplice

somnipax shield è una sottile protezione da inserire nello spazio tra le labbra e i denti anteriori (vestibolo orale). Impedisce la respirazione attraverso la bocca e contrasta il russamento di tipo velare.

- **Confortevole:** grazie al materiale piacevolmente morbido e alla struttura compatta, il boccaglio si adatta alla posizione naturale della mandibola, rendendo l'uso quotidiano particolarmente confortevole.
- **Efficace:** somnipax shield blocca in modo efficace la respirazione orale, responsabile delle vibrazioni nella zona del palato molle che causano il russamento. Con somnipax shield si respira in modo naturale attraverso il naso.
- **Semplice:** Il design è volutamente essenziale e ridotto al minimo indispensabile. Questo rende somnipax shield facile da usare ogni giorno, oltre che particolarmente igienico e durevole.

Come funziona il boccaglio?

I rumori del russamento si producono quando i tessuti nelle vie respiratorie superiori si rilassano durante il sonno. Questo rilassamento può avvenire in più punti della bocca e della gola.

Quando la tensione dei tessuti del palato molle si riduce, l'aria che passa può farli vibrare — in questo caso è proprio la vibrazione del palato molle a causare il russamento (questo tipo di russamento è chiamato velare, o talvolta orale).



Un boccaglio come somnipax shield impedisce efficacemente che l'aria che passa attraverso la bocca faccia vibrare il palato molle.



Come funziona? Il boccaglio viene inserito nel vestibolo orale, tra le labbra e gli incisivi anteriori, e fissato all'arcata superiore (la mandibola resta libera di muoversi). Se durante il sonno la bocca si apre, il boccaglio agisce come una barriera e impedisce la respirazione orale. Si continua così a respirare naturalmente attraverso il naso.

Nota importante:

Molte persone, durante il sonno, respirano inconsciamente con la bocca perché le vie nasali sono ostruite o ristrette. Per poter utilizzare somnipax shield, però, è necessario che il naso sia libero.

Se avete difficoltà a respirare dal naso, parlatene con il vostro medico prima di iniziare una terapia con il boccaglio.

Che cos'è somnipax shield



somnipax shield è un boccaglio in materiale termoplastico che si adatta una sola volta, prima del primo utilizzo, mediante un semplice bagno in acqua calda.

Una volta inserito nel vestibolo orale, somnipax shield permette di chiudere completamente le labbra e impedisce in modo affidabile la respirazione orale, prevenendo così il russamento velare.



Risultati di uno studio clinico con somnipax shield:

Il 98% degli utenti ha trovato il boccaglio estremamente confortevole da indossare.

Il 79% dei russatori cronici è riuscito a eliminare completamente il russamento o a ridurlo in modo significativo grazie all'uso del boccaglio.

Il 100% degli utenti è riuscito ad adattare autonomamente il dispositivo senza particolari difficoltà.

Studio condotto su 77 russatori cronici: Veres E., 'Clinical trial of an oral vestibular shield for the control of snoring', J Dent Assoc S Afr., 1993, vol. 48, no. 1: 15-7.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9511609/>

Come iniziare con somnipax shield

Il vostro medico valuterà insieme a voi se il boccaglio è adatto alle vostre esigenze.


Controindicazioni all'uso:

- Mancanza di un ancoraggio stabile sull'arcata superiore (ad esempio protesi totale o parziale rimovibile; meno di 4 incisivi anteriori ben saldi su 6)
- Uso notturno di un apparecchio ortodontico sugli incisivi anteriori
- Respirazione nasale gravemente e permanentemente compromessa
- Infiammazioni o lesioni acute nella bocca o ai denti (in questo caso l'uso è escluso solo temporaneamente)

L'adattamento di somnipax shield è semplice e rapido.



Il boccaglio è realizzato in materiale termoplastico: a temperatura corporea è flessibile e modellabile, ma mantiene la forma. Riscaldato in acqua calda, si ammorbidisce e diventa facilmente plasmabile.

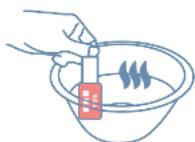

Basta portare l'acqua alla temperatura indicata, immergere il boccaglio seguendo le istruzioni e riscaldarlo.



Una volta pronto, si inserisce il boccaglio anti-russamento sull'arcata superiore, lo si preme delicatamente, si chiudono le labbra e si aspira tutta l'aria dalla bocca. Così il boccaglio si adatta perfettamente alla dentatura e alla forma del vestibolo orale, indurendosi in pochi secondi.



Se necessario, l'adattamento può essere ripetuto più volte fino a ottenere un'aderenza ottimale, senza alcun fastidio.

I vantaggi di somnipax shield a colpo d'occhio



Quasi impercettibile

Il boccaglio anti-russamento è piacevolmente morbido e flessibile; viene inserito nel vestibolo orale, tra le labbra e gli incisivi anteriori, e fissato all'arcata superiore. La mandibola inferiore e la lingua restano libere di muoversi nella loro posizione naturale.



Materiali testati - senza plastificanti

Marcato CE e realizzato in materiali termoplastici approvati negli USA (FDA) e nell'UE per il contatto con alimenti. Materiale privo di plastificanti come il BPA.



Semplice

Il boccaglio è progettato in modo volutamente semplice e ridotto all'essenziale; facilita la personalizzazione e l'uso, rendendo il prodotto igienico e durevole.



Discreto

Il boccaglio è molto leggero e sottile; viene adattato alla dentatura. Una volta indossato è praticamente invisibile dall'esterno.



Subito pronto all'uso

somnipax shield può essere rapidamente e facilmente adattato in ambulatorio o a casa; subito utilizzabile dopo la regolazione.

somnipax shield: il dispositivo orale confortevole per un sonno tranquillo



“somnipax shield ricorda nella forma un paradenti da boxe, ma è molto più piccolo e sottile. Per chi russa a causa della vibrazione del palato molle, rappresenta una soluzione confortevole e quasi impercettibile durante l’uso.”

DR. HANNES WAKONIG

Amministratore Delegato di AescuBrands
Produttore di somnipax shield

Se soffrite di russamento di tipo velare (cioè russate solo quando dormite con la bocca aperta, indipendentemente dalla posizione di riposo), parlatene con il vostro medico. Insieme valuterete se la terapia con somnipax shield è adatta al vostro caso.

Il vostro referente sanitario:

Timbro del medico