


somnipax belt

Trainer elettronico per la terapia posizionale

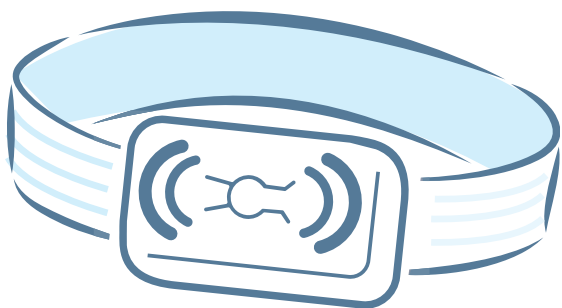


Trainer per la terapia posizionale contro il russamento semplice e le apnee notturne

Trainer elettronico per la terapia posizionale notturna, da utilizzare in caso di apnea ostruttiva posizionale del sonno (POSA) e nel russamento semplice in posizione supina (russamento alla base della lingua).

- **Durevole:** allena il corpo a modificare permanentemente la posizione di riposo dalla posizione sul dorso a quella laterale; con il tempo, si arriva a dormire senza russamento né apnee notturne anche senza cintura.
- **Delicato:** lievi vibrazioni segnalano se si dorme nella posizione sbagliata; appena si cambia posizione, le vibrazioni si interrompono.
- **Confortevole:** la cintura è sottile e in materiale traspirante, con una piccola centralina di controllo; è un dispositivo medico che quasi non si nota e che offre la massima libertà di movimento durante il sonno.

Come agisce un trainer elettronico per la terapia posizionale (“comportamentale”)?

Il russamento, ma anche le interruzioni nella respirazione notturna (“apnee”), si verificano quando i tessuti delle prime vie respiratorie si rilassano e si allentano durante il sonno. Se si dorme in posizione supina, questo rilassamento provoca in molti casi uno scivolamento della lingua all’interno della laringe, con conseguente restringimento o perfino blocco temporaneo delle vie aeree.

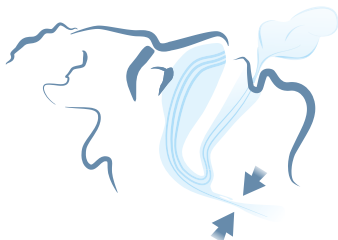

È la vibrazione dei tessuti molli nei punti di passaggio dell’aria a provocare il russamento. Se le vie aeree sono completamente bloccate, si verificano inoltre arresti nella respirazione. Un trainer posizionale elettronico impedisce in modo molto efficace che la lingua possa scivolare all’indietro nella laringe.



Come funziona? Il trainer posizionale elettronico registra quando si dorme sulla schiena, attivando una vibrazione. Il segnale persiste fino a quando non ci si sposta inconsciamente in posizione laterale o prona. Nella maggior parte dei casi, il paziente non percepisce né si sveglia a causa della vibrazione. Se si dorme su un fianco, il muscolo della lingua non ricade più all’interno della laringe, ma lateralmente in direzione delle guance. Di conseguenza, le vie aeree rimangono libere e il sonno non viene più disturbato da pericolose interruzioni del respiro né da fastidiosi rumori legati al russamento.

Cos'è somnipax belt



somnipax belt è un dispositivo per il controllo posizionale comanda-to elettronicamente, inserito in una fascia toracica elastica.

somnipax belt trova impiego in caso di apnea ostruttiva posizionale del sonno (POSA) da lieve a moderata e nel russamento semplice posizionale.



Suggerimento speciale: somnipax belt come complemento alla terapia CPAP

I pazienti con grave apnea notturna necessitano solitamente di un'elevata pressione di ventilazione per la terapia CPAP, che peggiora notevolmente il comfort di riposo. Punti di pressione sul viso, mucose molto secche e aumento del rumore del flusso d'aria sono conseguenze comuni.



Tutto questo è però evitabile! Indossando un trainer elettronico per il controllo della posizione durante la terapia CPAP, il paziente dorme in posizione laterale; di conseguenza, i tessuti alla base della lingua non possono più premere sulle vie aeree superiori con tutto il loro peso. Grazie a questa minore pressione sui tessuti, il dispositivo CPAP riesce inoltre ad aprire le vie aeree collassate utilizzando meno pressione.

Il vostro percorso per la terapia posizionale con somnipax belt



Rivolgetevi al vostro medico per verificare che il trainer elettronico posizionale sia adatto alle vostre esigenze.

I seguenti punti rappresentano una controindicazione all'utilizzo del dispositivo:

- portatori di pacemaker;
- forti dolori alla colonna vertebrale;
- convalescenza dopo un intervento chirurgico al disco intervertebrale;
- capogiri posturali;
- apnea notturna indipendente dalla posizione;
- allergia al lattice;
- non utilizzabile da persone di età inferiore ai 18 anni.

somnipax belt non deve essere regolato o adattato, è immediatamente pronto per l'uso. Se l'apnea ostruttiva posizionale del sonno (POSA) viene trattata con il trainer posizionale, il medico potrà verificare se il trattamento è efficace tramite endoscopia del sonno/polisonnografia.

Se il trainer posizionale viene utilizzato per il trattamento del semplice russamento dipendente dalla posizione, è possibile monitorare autonomamente il successo della terapia. Ad esempio, si può chiedere al compagno/a di letto se il russamento persiste, in alternativa sono disponibili app per lo smart-phone dedicate al russamento, che registrano e analizzano i rumori notturni.

I vantaggi di somnipax belt in sintesi



Quasi impercettibile:

la cintura è talmente morbida e delicata sulla pelle, che praticamente non si sente durante l'utilizzo notturno. Permette di dormire con la massima libertà di movimento.



Materiali testati e garanzia di assenza di sostanze nocive:

somnipax belt è prodotta in Svizzera nel rispetto di standard rigorosi. Tutti i componenti sono biocom-patibili e privi di sostanze nocive.



Discreta:

la cintura sottile e la centralina delle dimensioni di una scatola di fiammiferi sono appena percettibili quando indossate. Se si indossa la biancheria da notte sopra la cintura, questa diventa praticamente invisibile all'esterno.



Ecosostenibilità ed efficienza in termini di costi:

tutti i componenti di somnipax belt sono sostituibili. Garantito.



Subito pronta all'uso:

la cintura è immediatamente utilizzabile. Accendi. Dormi. Respira in modo sano.

“All’inizio, ci vuole un po’ di tempo per abituarsi alla vibrazione. Dopo però è fantastica. Soprattutto perché si inizia automaticamente a dormire nella posizione “corretta.”

JOHANNES B., HERTEN



somnipax belt: un approccio terapeutico avanzato per l'apnea ostruttiva del sonno e il russamento dipendenti dalla posizione



“La cintura rappresenta un approccio totalmente innovativo nella terapia dell'apnea ostruttiva del sonno e del russamento posizionali. Per gli sviluppatori, non era importante solamente l'efficacia del prodotto, ma anche la comodità di utilizzo per i pazienti.”

DR. HANNES WAKONIG

Amministratore delegato AescuBrands,
Produttore di somnipax belt

Se soffrite di russamento o apnee notturne, vi consigliamo di confrontarvi con il vostro medico di fiducia sull'uso di somnipax belt, per verificare che il dispositivo sia adatto alle vostre esigenze.

È così che trovo la taglia giusta:

Dimensione	Circonferenza [cm] del torace misurata sotto le ascelle
S/M/L	70-100
XL/XXL	100-125

Il vostro referente:

Sello médico

Editore: AescuBrands UG (responsabilità limitata),
Im Gewerbegebiet 5, 91093 Heßdorf, Germania

Aggiornamento: 25.04.2024