

Averigüe en 4 sencillos pasos si la férula va a encajar

¿No tiene claro si la férula antirronquidos se adaptará bien a su mandíbula? Le mostramos cómo puede comprobar si la férula es apropiada para el tamaño de su mandíbula.

Paso 1: Corte un cuadrado de una caja de cartón un poco gruesa y limpia. Este cuadrado debe tener un tamaño suficiente para introducirlo en su boca y dejar la mordida.



Paso 3: Coloque el trozo de cartón en una mesa y tome una regla para medir.



Paso 2: Introduzca este trozo de cartón en su boca y múrdalo. Ahora tendría que verse la marca de la mordida en el cartón. En caso de que no se vea, repita el proceso y muerda más fuerte.



Paso 4: Ahora mida la longitud y la anchura de su mandíbula en la zona más amplia de ambas dimensiones. Compare los resultados con los datos de tamaño de la férula antirronquidos. La longitud y la anchura de la férula antirronquidos debe tener un mínimo de un milímetro más de la medida que ha obtenido.



Dimensiones de la férula:

Producto	Longitud/ profundidad (mm)	Anchura (mm)	Altura del producto (mm)	Anchura ranura de mordida (mm)	Niveles de avance (aprox.)	Alcance de suministro
somnipax guard standard	42	60	24	13	0 mm hasta 12 mm (8 niveles)	2 piezas de férula, 2 bandas, caja ventilada, termómetro flotante, horquilla de mordida
somnipax guard large	45	67	27	15	-1 mm has- ta 9,5 mm (8 niveles)	2 piezas de férula, 2 bandas, caja ventilada, termómetro flotante, horquilla de mordida

Así se lleva a cabo la medición:

Longitud: La férula tiene forma de herradura. Mida desde uno de los extremos hasta el punto final (desplazado paralelamente hacia afuera).

Anchura: forma de herradura; medido desde un extremo a otro (en la zona externa más amplia).

Altura del producto: altura de la férula medida en el punto externo más elevado. Por lo general, suele ser en la parte delantera, aproximadamente donde se encuentran los dientes caninos.

Anchura de la ranura de la mordida: anchura de la ranura de la mordida rellena de material termoplástico en el punto más ancho (parte posterior de los molares).

Férula antirronquidos

