



Het gebruik van somnipax guard in geval van overbeet (mandibuliare retrognathie)

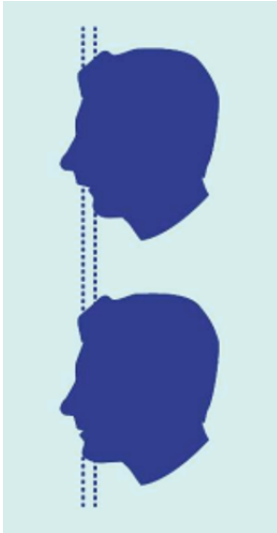


Voor wie last heeft van een uitgesproken overbeet (afbeelding 1), kunnen de standaard bandjes van een snurkbeugel in sommige gevallen te kort zijn. Met behulp van de bandjes wordt de aanzet van de onderkaak immers geregeld; wanneer de onderkaak zelf reeds heel ver naar achteren gepositioneerd is, zal zelfs de langste bandlengte de onderkaak zodanig naar voren trekken dat het dragen ervan als onaangenaam ervaren kan worden.

Afbeelding 1

Met de somnipax guard kan dit probleem op een elegante manier opgelost worden. Neem band nr. 6 (= de langste band) en snijd hem in twee delen zoals aangeduid op afbeelding 2. Hiermee bekomt u twee afzonderlijke banden die dan heel eenvoudig bevestigd kunnen worden in de somnofit (afbeelding 3). Deze banden zijn extra lang en zorgen ervoor dat de onderkaak nu heel matig naar voren getrokken wordt. De ideale oplossing dus voor personen met een uitgesproken overbeet.

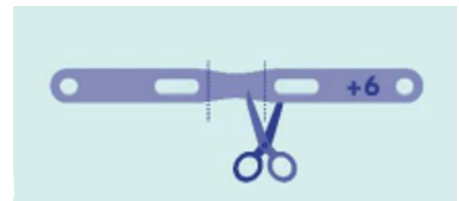

Afbeelding 2

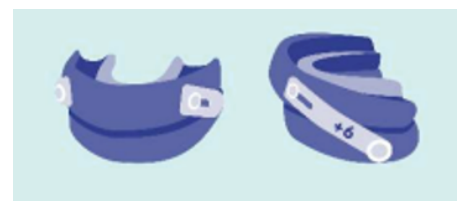

Afbeelding 3