


## L'utilisation de somnipax guard en cas de supraclusion (rétrognathie mandibulaire)

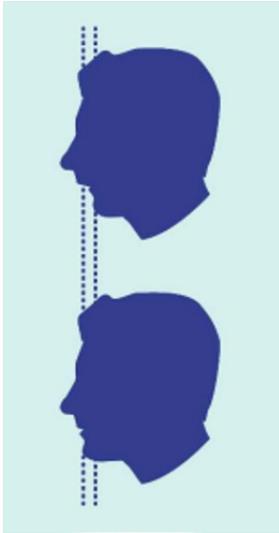

Pour les personnes qui souffrent d'une forte suroccclusion (figure 1), les bandes classiques d'une orthèse anti-ronflement peuvent, dans certains cas, être trop courtes. En effet, les bandes permettent de régler l'avancée de la mâchoire inférieure ; si la mâchoire inférieure est naturellement très décalée vers l'arrière, même la longueur de bande la plus longue la tirerait tellement vers l'avant que cela pourrait être désagréable à porter.

Figure 1

Le somnipax guard permet de résoudre ce problème de manière ingénieuse. On prend la bande n° 6 (= la plus longue) et on la coupe en deux, comme indiqué sur la figure 2. On obtient ainsi deux bandes séparées que l'on accroche ensuite normalement dans le Somnofit ( figure 3). Ces bandes sont très longues et font en sorte que la mâchoire inférieure ne soit que très modérément tirée vers l'avant. C'est donc la solution idéale pour les personnes présentant une forte supraclusion.

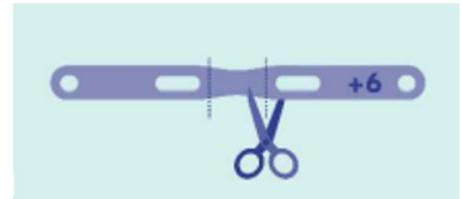


Figure 2



Figure 3