


Onderkaakprotrusiebeugel in 2 verschillende maten

somnipax guard standard

(voor kaken met normale grootte)

somnipax guard large

(voor grote kaken)

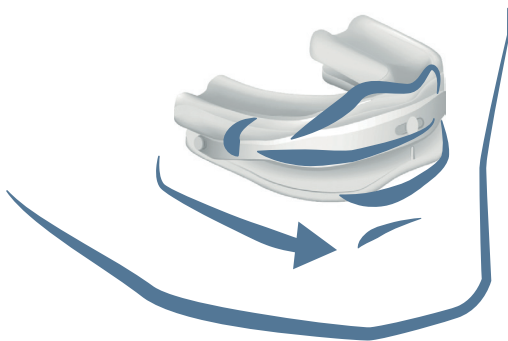

Snurkbeugel tegen eenvoudig snurken en nachtelijke ademhaling onderbrekingen

Onderkaakprotrusiebeugelvoorgebruikbijpositieafhankelijke obstructieve slaapapneu (OSA) en snurken op de tongbasis.

- **Hoog draagcomfort:** dankzij aangenaam zacht materiaal en een volume gereduceerd ontwerp, waarbij je slechts een klein beetje materiaal in je mond voelt.
- **Optimale pasvorm:** twee maten (normale maat / overmaat) om uit te kiezen; Individuele aanpassing van elke beugel aan uw eigen kaak.
- **Zeer flexibel in gebruik:** nauwkeurig verstelbare banden voor een zo laag mogelijke belasting van het kaakgewricht.
- **Klaar voor onmiddellijk gebruik:** wordt ter plaatse in de spreekkamer aangepast en kan direct mee naar huis worden genomen en door de patiënt worden gebruikt.


Hoe werkt een van de onderkaakprotrusiebeugel („snurkbeugel“)?

Snurkgeluiden, maar ook nachtelijke ademhaling onderbrekingen („apneus“) treden op wanneer het weefsel in de bovenste luchtwegen ontspant en verslapt tijdens de slaap.

In veel gevallen zorgt deze ontspanning ervoor dat de tong achterover in de keel zakt bij het slapen in rugligging, waardoor de luchtwegen daar vernauwen of zelfs tijdelijk worden afgesloten. Bij de vernauwing is er luchturbulentie en trillingen. Ze veroorzaken het snurkgeluid. Als de luchtwegen volledig gesloten zijn, treden er adempauzes op.



Een mandibulaire beugel zoals somnipax guard (standaard / groot) is zeer effectief om te voorkomen dat de tong tijdens de slaap naar achteren in de keel zakt.

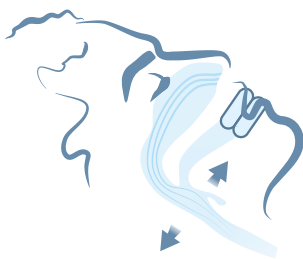

Hoe gaat dat in zijn werk? Door de onderkaak enkele millimeters naar voren te schuiven en zo de tongspier onder lichte spanning te zetten. Door deze lichte spanning kan de tongspier niet meer naar achteren zakken in de keel. De luchtwegen blijven vrij. Je slaapt vrij van gevaarlijke ademhaling onderbrekingen en vervelende snurkgeluiden.

Dit zijn de beugels somnipax guard standard en somnipax guard large


Beide beugels hebben een identiek ontwerp, maar verschillen in grootte en (licht) in de instelbare vooruitgang.



De betreffende bovenkaakbeugel is aangepast aan de vorm van de bovenste rij tanden, de onderkaakbeugel aan die van de onderste rij tanden.

Verbinding via de banden


Beide delen van de beugel (boven/onder) zijn met elkaar verbonden via een kunststof aanvoerband. Het zorgt voor vooruitgang, maar zorgt ook ervoor dat de onderkaak naar de zijkanten kan bewegen en dat de kaak gemakkelijk kan worden geopend.

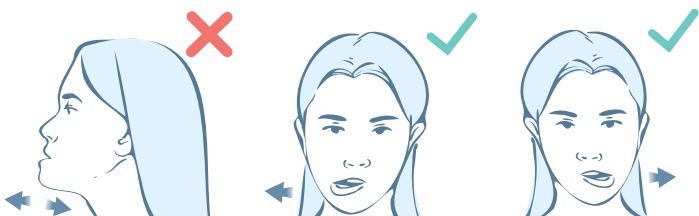

De vooruitgang kan worden geregeld via de verschillende bandlengtes van de somnipax beugel (standaard / groot):

somnipax guard standard: van een neutrale kaakpositie (0 mm) tot een vooruitgang van 12 mm.

somnipax guard large: van een negatieve kaakpositie (-1 mm) naar een vooruitgang van 9,5 mm.

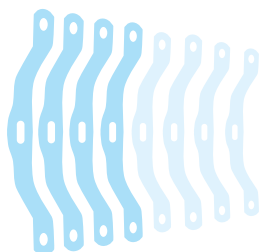

Hoe de somnipax guard beugel (standaard / groot) af te stellen



Uw arts zal bepalen of u in aanmerking komt voor beugeltherapie in een anamnese.

De volgende punten spreken tegen beugeltherapie:

- Uitneembare prothesen of slecht hechtende gedeeltelijke prothesen;
- Pijn in het kaakgewricht;
- Terugtrekkend tandvlees of losraken van tanden;
- Minder dan 10 tanden per kaak;
- Niet te gebruiken door personen jonger dan 18 jaar.

Die endgültige Entscheidung darüber, ob die Schiene für Sie in Frage kommt, trifft aber Ihre behandelnde Ärztin bzw. Ihr behandelnder Arzt.

De uiteindelijke beslissing of de beugel voor u geschikt is, wordt echter genomen door uw behandelend arts. De beugel wordt direct in de praktijk aangepast. Eerst gebruikt de arts het meet-sjabloon om uw kaakomvang te bepalen en selecteert hij de juiste beugelmaat (normale maat / overmaat).



De beugel voor de bovenkaak wordt dan aangepast aan je rij tanden in de bovenkaak. Het proces wordt vervolgens herhaald voor de beugel van de onderkaak. Tot slot stelt de tandarts de juiste vooruitgang voor je in en is de beugel klaar voor gebruik.

Dankzij de geprefabriceerde onderdelen en de nieuwste materialen duurt het aanmeten maar een paar minuten en is je beugel meteen klaar voor gebruik. De arts bespreekt verdere vervolgspraken direct met u.


De voordelen van de somnipax guard spalken (standaard / groot) op een rijtje:



U voelt slechts een klein beetje materiaal in uw mond: de natuurlijke opening van de kaak in ruststand is ca. 4 mm; als u somnipax guard standaard of large draagt, blijft de kaak ca. 6 mm open - u voelt de bijhoogte van de spalk nauwelijks!



Geteste materialen en gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen: somnipax guard standard en large worden onder strikte voorwaarden in Zwitserland vervaardigd. Alle ingrediënten zijn biocompatibel en vrij van schadelijke stoffen.

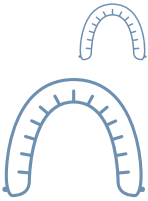

Optimale pasvorm. Razendsnel: uw arts gebruikt het meetsjabloon om de juiste beugel voor uw kaak te bepalen (standaard - voor kaken van normale grootte / large voor grote kaken) en maakt de individuele aanpassing direct. Een heel eenvoudig proces dat in totaal maar een paar minuten duurt.



Het dragen van een beugel - geschikt voor vele toepassings situaties: de protrusie van de spalk kan individueel worden aangepast over de verschillende riemlengtes. Uw arts zal de vereiste vooruitgang bepalen en u kunt de aanpassing heel eenvoudig zelf uitvoeren.



Duurzaamheid en kostenefficiëntie in actie: reserveonderdelen zijn beschikbaar voor alle componenten van somnipax guard standaard en large. Gegarandeerd.



Direct klaar voor gebruik: U kunt de beugel direct na de plaatsing door de arts mee naar huis nemen en met de therapie beginnen.

somnipax guard beugels: High-Tech producten voor uw gezondheid



«Deze producten zijn het resultaat van meerdere jaren ontwikkeling en nauwe samenwerking tussen artsen, ingenieurs en productietechnici. De beugels combineerden Zwitserse precisie met state-of-the-art hoogwaardige medische kunststoffen.»

DR. HANNES WAKONIG

Algemeen Directeur AescuBrands,
Fabrikant van somnipax beugels



«Met de somnipax guard standaard beugel zijn mijn nachtelijke adempauzes bijna volledig verdwenen.»

HANS K., HERZOGENAURACH

Als u last heeft van snurken of nachtelijke ademhaling onderbrekingen, overleg dan met uw arts over de somnipax guard spalken (standaard / groot). De arts bekijkt samen met u of beugeltherapie voor u geschikt is.

Uw aanspreekpartner:

Stempel arts

Uitgever: AescuBrands UG ((beperkte aansprakelijkheid),
Im Gewerbegebiet 5, 91093 Heßdorf, Duitsland

Laatste update: 19.06.2024