


oxyhero

CPAP pro

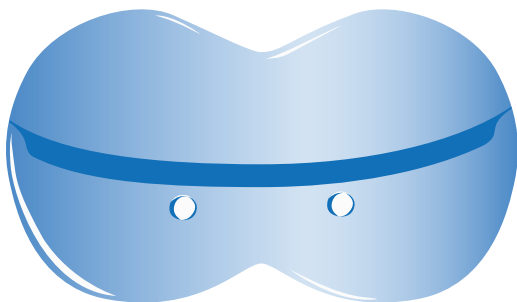

Schildbeugel tegen mondlekage bij de CPAP-therapie

oxyhero CPAP pro is een dun schild dat aangebracht wordt in de zone tussen de lippen en de voorste tanden (voorhof van de mond). Het voorkomt de lekkage van de CPAP-beademingslucht via de mond.

- **Doeltreffend:** de schildbeugel verhindert lekkage via de mond en zorgt voor een lagere beademingsdruk in de CPAP-therapie.
- **Comfortabel:** zonder mondlekkages kan de gebruiker van het Full Face masker overstappen naar een meer comfortabel neusmasker.
- **Niet belastend:** oxyhero CPAP pro wordt bevestigd aan de bovenkaak; de onderkaak en de tong blijven vrij beweeglijk in hun natuurlijke positie.


Zo werkt een schildbeugel tegen mondlekkage

Mondlekkage ontstaat wanneer de CPAP-beademingslucht via de mondopening ontsnapt. De CPAP-druk vermindert en de bovenste luchtwegen zijn niet meer volledig open - het weefsel kan opnieuw inklappen en er kunnen ademhalingsstops optreden.



Moderne CPAP-toestellen herkennen de drukvermindering en sturen bij - ze verhogen de beademingsdruk. Maar de sterke luchtstroom droogt de slijmvliezen uit en zorgt voor irritatie. De patiënten hebben last van een droge mond en gezwollen slijmvliezen; wat de bereidheid vermindert om de CPAP-therapie voort te zetten.

De schildbeugel vermindert dat de beademingslucht via de mondholte kan ontsnappen en er mondlekkage kan optreden.

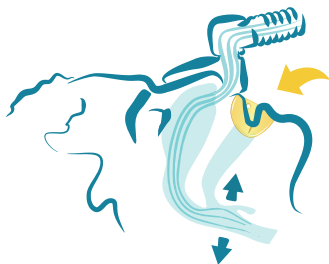

Hij werkt als een mechanische barrière die in de voorhof van de mond aangebracht wordt en een luchtlekage via de mond blokkeert. Bijgevolg blijft de luchtdruk in de bovenste luchtwegen constant en de CPAP-therapie is doeltreffend. De patiënt kan gewoonlijk overstappen op het meer comfortabel neusmasker.

Dit is oxyhero CPAP pro

oxyhero CPAP pro verhoogt met 93% zekerheid de doeltreffendheid van de maskertherapie
(medische studie van de universiteit Magdeburg*)

oxyhero CPAP pro stelt veel CPAP-patiënten met een Full Face masker in staat om over te stappen op een neusmasker en wel zonder zwaar in te boeten aan gebruikscomfort of doeltreffendheid van de therapie.



Want de schildbeugel is slechts lichtjes bevestigd aan de bovenkaak. De onderkaak en de tong blijven volledig beweeglijk en behouden hun natuurlijke positie (anders overigens dan de kinband, die de onderkaak en tongbasis naar achteren drukt en de luchtwegen bijkomend vernauwt).

De schildbeugel wordt in de voorhof van de mond aangebracht en zorgt ervoor dat de lippen volledig gesloten kunnen worden. Als de mond lichtjes opent tijdens de slaap dan verhindert het aangebrachte schild de uitstroom van de beademingslucht.

*Zie gegevens van de studie van Dr. med. Sebastian Föllner, specialist interne geneeskunde (algemene geneeskunde) Burgstall; Prevention of leakage due to mouth opening through applying an oral shield device during nasal CPAP therapy of patients with obstructive sleep apnea, Sleep Medicine 66 (2020), 168-173.

Uw weg naar oxyhero CPAP pro

Uw arts bespreekt met u of u in aanmerking komt voor een schildbeugel.


Het gebruik ervan wordt afgeraden bij:

- een niet voldoende stevige verankering van de bovenkaak (bijv. een volledige of gedeeltelijke uitneembare prothese; minder dan 4 van de 6 vastzittende voortanden)
- nachtelijke tandbeugel op de voorste tandenrij
- ernstige en permanente verstoring van de neusademhaling / CPAP-beademing door de neus niet mogelijk
- acute ontstekingen of letsels in de mond of tandzone (hier echter enkel een tijdelijke uitsluiting)

De aanpassing van oxyhero CPAP pro is snel en eenvoudig.



De schildbeugel bestaat uit thermoplastische kunststof. Bij lichaamstemperatuur is deze flexibel en buigzaam maar ook vormvast. Verwarmd in warm water wordt hij zacht en vervormbaar.

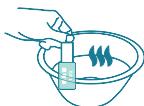

Verwarm het water tot de gewenste temperatuur. Volg de handleiding en dompel de schildbeugel onder en verwarm.



Breng de schildbeugel aan op de bovenkaak, druk vast aan, sluit de lippen en zuig alle lucht uit de mondholte. De schildbeugel past zich aan de vorm van de tanden en de mondvoorhof aan en hardt uit binnen een paar seconden.



Het aanpassingsproces kan indien nodig een paar keer herhaald worden tot het mondstuk perfect zit zonder storend gevoel.

De voordelen van oxyhero CPAP pro op een rijtje

Nauwelijks merkbaar



Een schildbeugel is aangenaam zacht en flexibel; wordt aangebracht in de voorhof van de mond tussen de lippen en de voorste tanden en vastgemaakt aan de bovenkaak. Onderkaak en tong blijven vrij beweeglijk en in de natuurlijke positie.

Getest materiaal - zonder weekmakers



CE-gemarkeerd en geproduceerd uit thermoplastische kunststof, die toegestaan zijn in de VS (FDA) en in de EU voor contact met levensmiddelen. Materiaal vrij van weekmakers zoals BPA.

Eenvoudig



De schildbeugel is doelbewust eenvoudig geconcepieerd en gereduceerd tot de essentie; garandeert een gemakkelijke aanpassing en eenvoudig gebruik en zorgt voor een hygiënisch en duurzaam product.

Discreet



De schildbeugel is heel licht en dun; hij wordt aangepast aan de structuur van de tanden. Bovendien bij het dragen ervan praktisch onzichtbaar aan de buitenkant.

Onmiddellijk gebruiksklaar



oxyhero CPAP pro kan snel en eenvoudig aangepast worden in de artspraktijk of thuis; na aanpassing onmiddellijk gebruiksklaar.

oxyhero CPAP pro: mondlekkages eenvoudig verhelpen



“De schildbeugel biedt aan veel gebruikers van Full Face maskers een heel eenvoudige en comfortabele mogelijkheid om over te stappen op een neusmasker. Met de gekende gevolgen voor de levenskwaliteit: lagere beademingsdruk, minder benauwd gevoel, betere slaap.”

DR. HANNES WAKONIG

Zaakvoerder AescuBrands
Producent van oxyhero CPAP pro

Als u last heeft van mondlekkage, spreek uw arts aan over oxyhero CPAP pro. Hij zal samen met u bekijken of de therapie met een schildbeugel geschikt is voor u.

Uw contactpersoon:

Stempel arts

Geïnteresseerd in meer informatie en campagnes over slaapgezondheid? Abonneer je op onze social media kanalen en mis nooit meer iets!

 **facebook**



 **Instagram**



 **YouTube**



Uitgever: AescuBrands UG (beperkte aansprakelijkheid),
Im Gewerbegebiet 5, 91093 Heßdorf, Duitsland
Laatste update: 15.05.2025



01ME0056