




somnipax belt

Elektronische slaappositietrainer

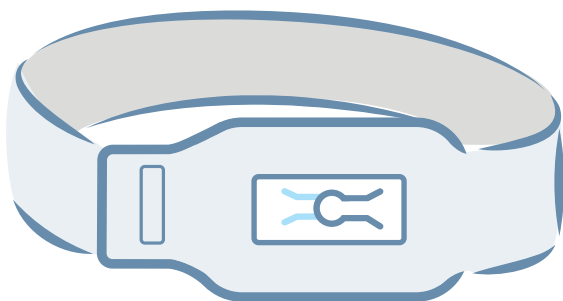


Slaappositietrainer tegen gewoon snurken en nachtelijke ademhalingstops

Elektronische slaappositietrainer voor gebruik zowel bij positie- afhankelijke obstructieve slaapapneu (POSA) als gewoon snurken in rugpositie (tongbasissnurken).

- **Duurzaam:** is erop gericht om de slaappositie continu te veranderen - weg van de rugpositie, naar de zijligging; na verloop van tijd slaapt u ook zonder riem snurkvrij, resp. zonder apneus.
- **Zacht:** lichte trillingen signaleren tijdens de slaap de foutieve ligpositie; u moet zich omdraaien zodat de rust terugkeert.
- **Comfortabel:** een smalle riem uit ademend materiaal met een kleine besturingsbox; een medisch product dat men nauwelijks opmerkt en een maximale bewegingsvrijheid biedt tijdens de slaap.

Hoe werkt een elektronische slaappositietrainer (“houdingveranderende positietherapie”)?

Niet alleen snurkgeluiden maar ook nachtelijke ademhalingsstops (“apneus”) ontstaan wanneer het weefsel in de bovenste luchtwegen tijdens de slaap ontspant en verslapt. In veel gevallen zorgt deze ontspanning er voor dat de tong tijdens de slaap op de rug naar achteren in de keelholte daalt en daar de luchtwegen vernauwt en zelfs tijdelijk afsluit.

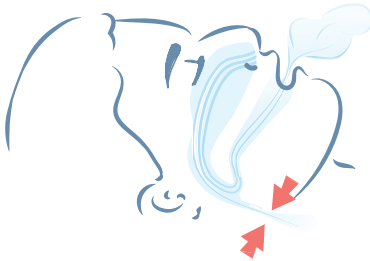


Aan de vernauwingen ontstaan luchtwervelingen en vibraties. Ze veroorzaken het snurkgeluid. Als de luchtwegen volledig afgesloten worden, ontstaan er ademhalingsstops. Een elektronische slaappositietrainer verhindert heel doeltreffend dat de tong naar achteren in de keelholte kan dalen.



Hoe gaat het in zijn werk? De elektronische slaappositietrainer registreert wanneer men op de rug slaapt en zendt een trilsignaal uit. Het signaal blijft zolang aanhouden tot men zich onbewust gedraaid heeft op de zij of de buik. In de meeste gevallen ervaart men de trilling helemaal niet bewust of wordt men niet wakker. Slaapt men op de zij dan daalt de tongspier niet naar achteren in de keelholte maar naar de zijkant in de richting van de wang. Als gevolg hiervan blijven de luchtwegen vrij. Men slaapt zonder gevaarlijke ademhalingsstops en vervelende snurkgeluiden.

Dit is de somnipax belt

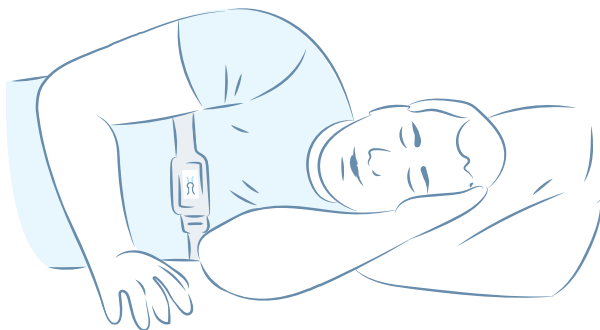

De somnipax-gordel is een elektronisch gestuurd positiecontrolesysteem dat in een elastische, in grootte verstelbare gordel wordt gestoken. Geschikt voor alle maten (buik-/borstomvang van 70-125 cm).

De somnipaxgordel wordt gebruikt bij lichte tot matige positieafhankelijk slaapapneu (POSA) en positieafhankelijk snurken.



De bijzondere tip - somnipax belt als aanvulling op de CPAP-therapie

Patiënten met zware slaapapneu hebben in de regel een hoge beademingsdruk nodig bij de CPAP-beademing. Dit belemmert duidelijk het slaapcomfort. Drukplaatsen in het gelaat, sterk uitgedroogde slijmvliezen en een verhoogde geluidsontwikkeling door de luchtstroom zijn de gebruikelijke gevolgen.



Maar dat hoeft helemaal niet! Als er bij de CPAP-therapie een elektronische slaappositietrainer gedragen wordt, die de patiënt aanzet om op de zij te slapen, kan het tongbasisweefsel alleszins niet meer voluit drukken op de bovenste luchtwegen. Minder weefseldruk op de luchtwegen betekent dat een lagere luchtdruk in het CPAP-toestel volstaat om de vernauwde luchtwegen opnieuw te verwijderen.

Uw weg naar somnipax belt



Uw arts bespreekt met u of een therapie met behulp van de elektronische slaappositietrainer in aanmerking komt.

Het gebruik van een elektronische slaappositietrainer is niet geschikt als therapie:

- voor personen die gebruik maken van een pacemaker,
- bij hevige klachten van de wervelkolom,
- bij herstel na een operatie aan de ruggenwervels,
- wanneer er geleden wordt aan positieduizeligheid,
- bij niet positiegerelateerd slaapapneu-syndroom,
- bij personen jonger dan 18 jaar.

De somnipax belt moet niet aangepast of ingesteld worden maar is direct gebruiksklaar. Wanneer een positie-afhankelijke obstructieve slaapapneu (POSA) behandeld wordt met de slaappositietrainer, dan zal uw behandelende arts therapiegeleidend controleren of de behandeling doeltreffend is (slaapendoscopie/polygrafie).

Indien gewoon positie-afhankelijk snurken behandeld wordt met de slaappositietrainer dan kunt u zelf uw therapieresultaat opvolgen. Bijvoorbeeld door aan uw bedpartner te vragen of het snurkgeluid blijft aanhouden of door gebruik te maken van een snurk-app op uw smartphone, die de nachtelijke geluiden registreert en verwerkt.

De voordelen van de somnipax belt op een rij



Nauwelijks merkbaar:

U merkt nauwelijks de zachte, huidvriendelijke riem 's Nachts. U slaapt met een maximale bewegingsvrijheid.



Getest materiaal en gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen:

De somnipax belt wordt onder strikte voorwaarden geproduceerd in Zwitserland. Alle bestanddelen zijn biocompatibel en vrij van schadelijke stoffen.



Discreet:

De smalle riem en de besturingsbox zijn zo groot als een luciferdoosje en vallen amper op tijdens het dragen. Als u nachtkleding draagt over de riem, is hij nauwelijks waarneembaar door andere personen.



Duurzaam en kostenefficiënt:

Er zijn reserve onderdelen beschikbaar voor alle componenten van de somnipax belt. Gegarandeerd.



Onmiddellijk gebruiksklaar:

U kunt de riem onmiddellijk in gebruik nemen. Inschakelen. Slapen. Gezond ademen.

“In het begin moet men wennen aan de trilling. Maar na een tijdje is het prima. Vooral wanneer men automatisch begint “juist” te liggen.”

JOHANNES B., HERTEN



somnipax belt: een heel moderne therapiemethode tegen positie-afhankelijke obstructieve slaapapneu en snurken



“De riem is een volledig nieuwe methode in de therapie van positie-afhankelijke slaapapneu en positiegerelateerd snurken. Het was voor de ontwerpers niet alleen belangrijk dat het product doeltreffend is maar ook dat het voor de patiënten heel aangenaam is in gebruik.”

DR. HANNES WAKONIG

Zaakvoerder AescuBrands,
Fabrikant van de somnipax belt

Als u last heeft van gesnurk of nachtelijke ademhalingsstops, spreek dan met uw arts over de somnipax belt. Hij zal samen met u onderzoeken of de elektronische slaappositietrainer geschikt is voor u.

Uw contactpersoon:

Stempel arts

Geïnteresseerd in meer informatie en promoties over slaapgezondheid?
Abonneer je op onze social media kanalen en mis nooit meer iets!



Uitgever: AescuBrands UG (beperkte aansprakelijkheid),
Im Gewerbegebiet 5, 91093 Heßdorf, Duitsland

Laatste update: 25.04.2025



01ME0063