

Handige lengte van 120 cm; Geschikt voor alle CPAP-standaardslangen (met binnendiameter 19 mm en huls 22 mm).

Toepassing:

1. Rol de slangborstel voorzichtig af en maak hem recht. Om metaalmoeheid van de draad door het op- en afrollen te voorkomen, is het raadzaam een plek te vinden waar u de borstel kunt ophangen.
2. Was de borstel voor gebruik met een mild schoonmaakmiddel en warm water. Spoel vervolgens af met koud water.
3. Om de CPAP-slang schoon te maken, moet u bovendien een mild reinigingsmiddel (bijvoorbeeld SomnoSept) en lauw water gebruiken (koud of lauw water wordt aanbevolen, omdat heet water kunststoffen kan uitdrogen en de levensduur ervan kan verkorten).
4. Houd de slang zo recht mogelijk om onnodige slijtage of schade te voorkomen. Duw de borstel voorzichtig dieper in de slang met korte, duwende bewegingen.
5. Om het andere uiteinde schoon te maken, steekt u de slangborstel in het andere uiteinde van de slang.
6. Spoel de slang na het reinigen grondig af met koud water.
7. Om de binnenkant van de slang te drogen, sluit u deze aan op de CPAP-machine en laat u deze ongeveer 15 minuten draaien totdat het vocht verdampt is.
8. Droog de borstelharen voorzichtig af door ze af te deppen met een handdoek of doek, en hang de borstel vervolgens in een ruimte met voldoende luchtcirculatie.

Opmerkingen/waarschuwingen:

De borstel is korter dan een CPAP-slang. Hierdoor is de borstel gemakkelijk hanteerbaar.

Daarom moet de CPAP-slang van beide kanten met de borstel worden gereinigd. Buiten bereik van kleine kinderen houden. Borstel bij beschadiging van de opzetborstel niet meer gebruiken.