


# somnipax guard standard

Onderkaakprotrusiebeugel

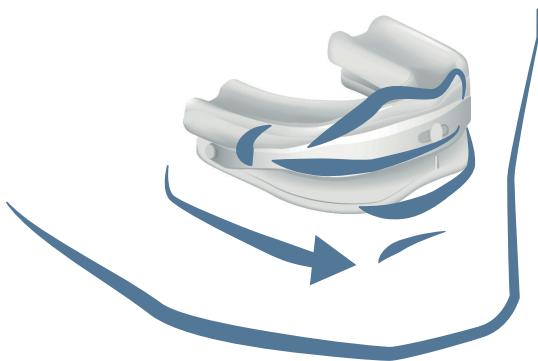

## Snurkbeugel tegen gewoon snurken en nachtelijke ademhalingstops

Onderkaakprotrusiebeugel om niet alleen te gebruiken bij positie-afhankelijke obstructieve slaapapneu (OSA) maar ook bij tongbasissnurken

- **Hoog comfort tijdens het dragen:** dankzij aangenaam zacht materiaal en een kleiner ontwerp zodat men weinig materiaal in de mond voelt.
- **Heel soepel in gebruik:** wordt individueel aangepast aan de kaak; de beugel heeft een variabele breedte en een precies verstelbare aanzet.
- **Direct klaar voor gebruik:** de beugel wordt ter plaatse aangepast bij de arts en kan door de patiënt onmiddellijk meegenomen worden naar huis en in gebruik genomen worden.


## Hoe werkt een onderkaakprotrusiebeugel (“snurkbeugel”)?

Niet alleen snurkgeluiden maar ook nachtelijke ademhalingstops („apneus“) ontstaan wanneer het weefsel in de bovenste luchtwegen tijdens de slaap ontspant en verslapt.

In veel gevallen zorgt deze ontspanning er voor dat de tong tijdens de slaap in rugligging naar achteren in de keelholte daalt en daar de luchtwegen vernauwt of zelfs tijdelijk afsluit. Aan de vernauwingen ontstaan luchtwervelingen en vibraties. Ze veroorzaken het snurkgeluid. Als de luchtwegen volledig afgesloten worden, ontstaan er ademhalingstops.



Een onderkaakprotrusiebeugel zoals de somnipax guard standard verhindert heel doeltreffend dat de tong tijdens de slaap überhaupt nog naar achteren in de keelholte kan dalen.

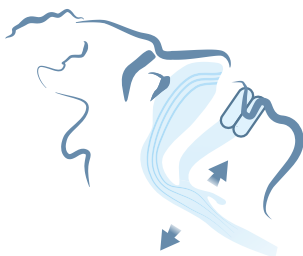

Hoe gaat het in zijn werk? Doordat de onderkaak een paar millimeter naar voren verplaatst wordt en zo de tongspier lichtjes onder spanning zet. Door deze lichte spanning kan de tongspier niet meer naar achteren in de keelholte dalen. De luchtwegen blijven vrij. U slaapt zonder gevaarlijke ademhalingstops en vervelende snurkgeluiden.


## Dit is de somnipax guard standard




De bovenkaakbeugel wordt aangepast aan de vorm van de bovenste tandenrij, de onderkaakbeugel aan die van de onderste tandenrij.

### Verbinding met de bandjes

De twee afzonderlijke beugels worden verbonden met elkaar door het aanzetbandje uit kunststof. Het zorgt voor de aanzet maar de beweging van de onderkaak aan de zijkanten blijft mogelijk en de kaak kan lichtjes open

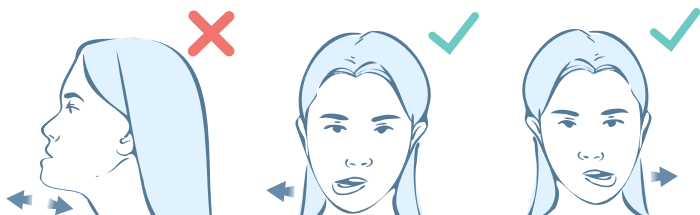

Met behulp van de verschillende bandlengtes van de somnipax guard standard kan de aanzet geregeld worden. Van een neutrale kaakpositie (0 mm) naar een protrusie van 12 mm.

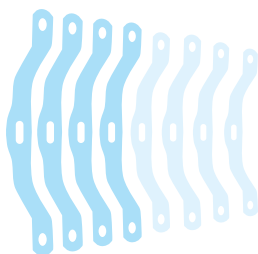

## Zo wordt de somnipax guard standard aangepast



Aan de hand van een anamnesegegesprek bepaalt uw arts of u in aanmerking komt voor een beugeltherapie.

### **Volgende punten staan een beugeltherapie in de weg:**

- uitneembare tandprothese of slecht hechtende gedeeltelijke prothese;
- pijn in het kaakgewricht;
- letsels aan het tandvlees of loszittende tanden;
- minder dan 10 tanden per kaak;
- niet te gebruiken bij personen jonger dan 18 jaar.

De definitieve beslissing of u in aanmerking komt voor de beugel, wordt getroffen door uw behandelende arts.

De aanpassing van de beugel gebeurt in de praktijk onmiddellijk. Hierbij wordt eerst de beugel van de bovenkaak aangepast aan uw tandenrij in de bovenkaak.



Vervolgens wordt de werkwijze herhaald voor uw onderkaakbeugel. Uiteindelijk stelt de arts de juiste aanzet voor u af en de beugel is gebruiksklaar.

Door de voorgevormde onderdelen en de meest moderne materialen duurt de aanpassing slechts een paar minuten en uw beugel is dan meteen klaar voor gebruik. Verdere controle-afspraken voor de follow-up bespreekt de arts persoonlijk met u.


## De voordelen van de somnipax guard standard op een rij



**U voelt maar weinig materiaal in de mond:** de natuurlijke opening van de kaak in rustpositie bedraagt ca. 4 mm; als u de somnipax guard standard draagt, blijft de kaak ca. 6 mm open – u voelt amper de beethoogte van de beugel!



**Getest materiaal en gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen:** somnipax guard standard wordt onder strikte voorwaarden geproduceerd in Zwitserland. Alle bestanddelen zijn biocompatibel en vrij van schadelijke stoffen.

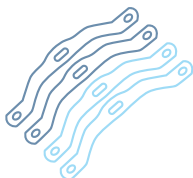

**Een beugel – veel gebruiksmogelijkheden:** dankzij de verschillende bandlengtes kan de aanzet van de beugel individueel aangepast worden. Uw arts kan bij de maatanalyse de beugel optimaal afstellen.



**Duurzaam en kostenefficiënt:** er zijn vervangstukken beschikbaar voor alle componenten van de somnipax guard standard. Gegarandeerd.



**Onmiddellijk gebruiksklaar:** na aanpassing door de arts kunt u de beugel meteen meenemen naar huis en starten met de therapie.

*«Met de beugel somnipax guard standard zijn mijn nachtelijke ademhalingstops nagenoeg volledig verdwenen.»*

**HANS K., HERZOGENAURACH**



## somnipax guard standard: een stukje high-tech voor uw gezondheid



«Aan dit product zijn verschillende jaren van ontwikkeling en een nauwe samenwerking voorafgegaan tussen artsen, ingenieurs en productietechnici. *somnipax guard standard* combineert Zwitserse precisie met de meest moderne medische hoogwaardige kunststoffen.»

### **DR. HANNES WAKONIG**

Zaakvoerder AescuBrands,  
Fabrikant van *somnipax guard standard*

Als u last heeft van gesnurk en nachtelijke ademhalingstops, spreek dan met uw arts over de *somnipax guard standard*. Hij zal samen met u onderzoeken of de beugeltherapie geschikt is voor u.

### **Uw contactpersoon:**

Stempel van de arts

**Uitgever:** AescuBrands UG (beperkte aansprakelijkheid),  
Im Gewerbegebiet 5, 91093 Heßdorf, Duitsland

**Stand:** 24.04.2024